

Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ



**Orlett®**  
вернет радость движения

### Правила ухода:

Для ортеза предусмотрена влажная обработка при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



### Условия хранения:

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

### Условия утилизации:

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

### Срок годности:

Срок годности не установлен. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

### Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. AFO-101, инструкция по применению.

### Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции и правил эксплуатации ортеза.

Сертификат соответствия № РОСС DE.ИМ24.В02193 от 14.01.2009 г.  
Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ. РУ ФС 2006/2376 от 28.12.2006 г.  
Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.12.939.П.035069.09.05 от 21.09.05 г.

**Производитель:** Рехард Технолджис ГмбХ  
Германия, 04316, Лейпциг, Херман-Сандер штрассе, 27.  
**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.  
**Для корреспонденции:** Россия, 127220, Москва, а/я №60.

Арт. INTOK-AFO-101-NS\_02/11

Medical Line



## Инструкция по применению ортопедических изделий



**Ортез на голеностопный сустав и стопы  
AFO-101**

Сделано в Германии

### **Свойства товара (оказываемые эффекты):**

Ортез Orlett® на голеностопный сустав и стопу (ортез – стоподержатель), арт. AFO-101 удерживает стопу в физиологически правильном положении и способствует восстановлению нормального (естественного) стереотипа ходьбы.

### **Показания к применению:**

Синдром отвисающей стопы после перенесенных невритов, повреждений малоберцового нерва при травмах, после инсультов, травм спинного мозга, детского церебрального паралича, нейроинфекции и опухолей спинного мозга.

### **Режим и сроки ношения:**

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач.

### **Противопоказания:**

Не выявлены.

### **Предупреждения:**

- людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необходимо проконсультироваться у врача;
- людям с чувствительной кожей следует надевать ортез на хлопчатобумажный носок, плотно прилегающий к телу или эластичный биндаж легкой степени фиксации (например биндаж Orlett® на голеностопный сустав серии COOLMAX®);
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения ортеза.

### **Инструкция по применению**

#### **Конструкция ортеза:**

Цифры на рис.1 соответствуют следующим элементам конструкции:

1. пластиковая гильза стоподержателя;
2. фиксирующий на голени ремень с застежками-липучками «Велкро»;
3. фиксирующий ремень на область стопы или лодыжки.



**Рис. 1**

### **Порядок надевания:**

#### **Ортез надевают на хлопчатобумажный носок.**

1. Разместите стопу на гильзе ортеза и зафиксируйте на голени регулируемым ремнем с застежками-липучками «Велкро».
2. Дополнительно зафиксируйте гильзу фиксирующим ремнем на стопе либо над лодыжками.
3. Поместите стопу с ортезом в обувь.

### **ВНИМАНИЕ!**

Ортез предназначен для ношения в обуви!

### **Правила подбора:**

Ортез-стоподержатель Orlett® подбирается по размеру обуви, на левую или на правую ногу.

### **Таблица подбора размеров:**

Ортез Orlett® стоподержатель, арт.: AFO-101		
Размер	Размер мужской обуви	Размер женской обуви
S	35-38	до 37
M	39-43	37-39
L	43-45	39-42
XL	45-47	43-45

### **Состав изделия:**

65% полипропилен, 30% нейлон, 5% сополимер этилена и винилацетата.