



## Parce Dentes

Качественные инструменты и материалы для имплантации и хирургической стоматологии

Москва, Дмитровское шоссе 157  
строение 9, офис 9299

тел. +7 (926) 790-13-00  
<https://parce-dentes.com/>

# Safescraper<sup>®</sup> TWIST




## Костный скребок Safescraper TWIST

Инструмент для отбора аутогенной костной ткани при регенеративной челюстно-лицевой хирургии.

### Инструкция по применению

- Перед использованием убедитесь в целостности упаковки.
  - Данный инструмент может применяться только квалифицированным медицинским персоналом.
- 
- Любые манипуляции с инструментом допускаются только в стерильных перчатках. Необходимо проявлять осторожность, чтобы не допустить пореза перчаток острыми краями лезвия.
  - После использования утилизировать в контейнер для медицинских отходов с соблюдением местных правил и норм.
  - МЕТА не несет ответственности за последствия неправильного обращения с инструментом.

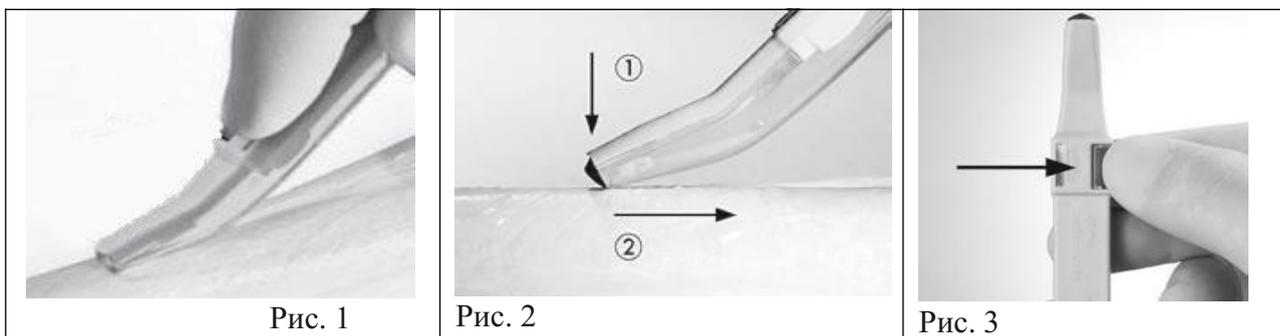

- 1 Вскройте упаковку в месте, помеченном символом. Положите инструмент на стерильную поверхность, уделяя максимум внимания поддержанию стерильности.
- 2 Инструмент необходимо держать в руках таким образом, чтобы прозрачный резервуар всегда был направлен в сторону кости и чтобы гарантировать точность его движения во время использования (см. рис. 1).

3 Отбор образца костной ткани производится путем надавливания на конец инструмента в направлении поверхности кости одновременно с оттягиванием самого инструмента в обратном направлении. (см. рис. 1). Отбор образца костной ткани также можно производить путем перемещения инструмента под углом и из стороны в сторону. Варьируя угол наклона инструмента и давление, можно добиться получения блоков или пластинок костной ткани нужной структуры. В прямом положении резервуар Safescraper® вмещает до 3 см<sup>3</sup> костной ткани; резервуар Safescraper@curve вмещает до 2,5 см<sup>3</sup>.



Рис. 4

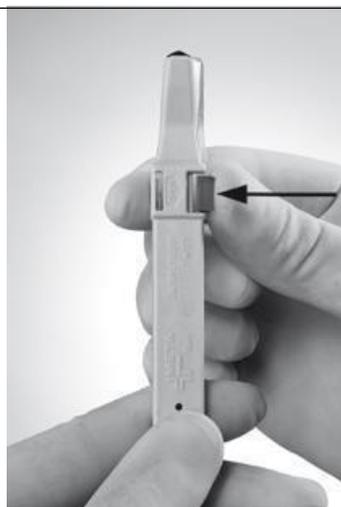


Рис. 5

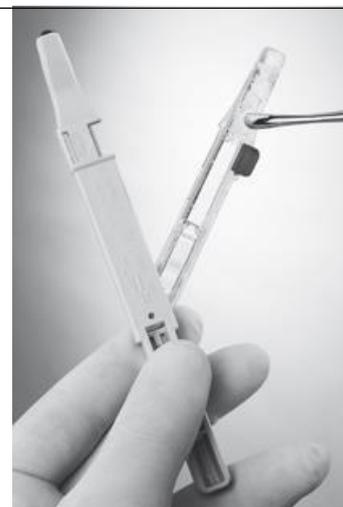


Рис. 6

4 Для сбора ткани нужно повернуть инструмент прозрачным резервуаром вниз, нажать фиксатор вбок и повернуть резервуар по часовой стрелке (см. рис. 3-4).

Прежде чем продолжить процедуру отбора костной ткани или утилизировать Safescraper®, необходимо вернуть резервуар в начальное положение и, удерживая кнопку нажатой в продольном направлении, защелкнуть фиксатор (см. рис. 5).

Для переноса пластинок или блоков костной ткани в область пересадки можно воспользоваться любыми щипцами или ложкой (см. рис. 6).

**Рекомендации:**

Если инструмент режет недостаточно хорошо, попробуйте изменить угол приложения и силу нажима на кость.

Если таким образом качество резки не удастся улучшить, вероятно, лезвие износилось и инструмент нуждается в замене.

- устройство предназначено для одноразового использования.



Ни при каких обстоятельствах не допускаются чистка и повторная стерилизация устройства после использования.

**Внимание:** использование одного инструмента для проведения процедур с несколькими разными пациентами может привести к ухудшению его рабочих характеристик и функциональных возможностей, а также к перекрестному загрязнению!

**Предупреждения:**

Решение о том, готов ли пациент к пересадке кости, принимает хирург.

Хирург должен принять все необходимые меры предосторожности для профилактики инфекций и осложнений, которые могут быть вызваны операциями по пересадке кости.