

suavinēx



Manual de instrucciones

Instruction manual

Manuel d'instructions

Manuale d'istruzioni

Gebrauchsanweisungen

Manual de instruções

Užívateľský manuál

Uživatel'ský manuál

Руководство по эксплуатации

Vejledning

Gebruikshandleiding

Οδηγίες χρήσης

Kullanım kilavuzu

دليل التعليمات



RU : ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вы можете скачать инструкцию по эксплуатации в цифровом формате на www.suavinex.com

Линия продукции для грудного вскармливания Suavinex поможет Вам, если по причине возвращения на работу, проблем со здоровьем, вовлечения других членов вашей семьи в детское питание, или по любым другим причинам, Вы должны сцеживать молоко.

• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОЛОКООТСОС

Электрический молокоотсос Suavinex предоставляет собой насос, который сцеживает молоко без усилий, подражая ритму сосания ребенка во время грудного кормления. Его уникальная система двойной регулировки Link™ позволяет настроить, с одной стороны, частоту всасывания и, с другой стороны, интенсивность вакуума. Вы можете начать с очень нежного всасывания, а затем варьировать скорость и интенсивность в зависимости от чувствительности вашей груди, достигая, таким образом, полного контроля над процессом сцеживания молока. Молокоотсос идеально подходит для груди благодаря анатомической чаше анатомической воронке без дополнительных силиконовых частей, что обеспечивает лучшее сцепление и лучший вакуум.

Благодаря возможности использования батареек, заслонки на задней части насоса, молокоотсос можно поместить на талии, чтобы свободно двигаться и сцеживать молоко в любом месте и в любое время. Его тканевая сумочка предназначена для гигиеничного хранения или ношения за пределами дома.

У вас есть 2 функции, позволяющие сцедить молоко:

- а) прямо в бутылочку Zero.Zero™ (входит в комплект).
- б) в любую бутылочку Suavinex (не входит в комплект), что позволяет как кормить, так и хранить молоко.

• Эта коробка включает:

- Электрический молокоотсос
- Электрический насос
- Вакуумная трубка
- Зарядное устройство
- Бутылочка Zero.Zero™ 120 мл с соской регулируемого потока
- 3 пакета для грудного молока на молнии (одноразовое использование)
- Текстильная сумка для транспортировки
- Запасные части: резиновая прокладка воронки (5) и силиконовая деталь запорного клапана (11).

BP-061

Вход адаптера: 100В – 240В ~; 50 Гц / 60 Гц; 0,5А; Изоляция класса II

Вход сцеживателя: 6В ---; 1,5А

• ВКЛЮЧАЕТ БУТЫЛОЧКУ ZERO.ZERO™


РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ СМЕШАННОГО ГРУДНОГО ВКАРМЛЕНИЯ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ВОСПРОИЗВОДИТ РАБОТУ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ВО ВРЕМЯ СОСАНИЯ

ПАКЕТИК АНТИ-КОЛИКИ

В результате простого наблюдения за природой, запатентованный пакетик анти-колики сжимается, когда ребенок сосет, так же, как и молочные железы. Пакетику не нужен внешний воздух для компенсации вакуума, который создается внутри, поэтому пузырьки не образуются. Таким образом, мы помогаем избежать газовых колик у ребенка, не позволяя воздуху окислять молоко и разрушать питательные вещества.

- Из полужесткого, гибкого и очень прочного силикона, пакетик легко стирается без специальных принадлежностей для чистки.
- Рекомендован даже недоношенным детям со слабой силой всасывания.

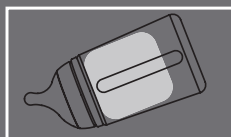

БЕЗ ПУЗЫРЬКОВ

- Без поглощения воздуха
- Без окисления молока



УЛЬТРА-МЯГКАЯ СИЛИКОНОВАЯ СОСКА

Ее конструкция, основанная на научных исследованиях, позволяет воссоздать условия, аналогичные естественному грудному вскармливанию с точки зрения захвата, усилия и всасывания. Ребенку не нужно ждать, пока выйдет молоко, достаточно будет приложить усилие, чтобы пить из бутылочки, как из груди.



УЛЬТРА МЯГКИЙ СИЛИКОН

- Имитирует сосок матери в виде текстуры, консистенции и формы.
- Окрашен для большего эстетического сходства с кожей.



БОЛЕЕ МЯГКАЯ СОСКА И ИЗОГНУТОЕ ОСНОВАНИЕ

- Позволяет рту, языку и челюстным мышцам располагаться и работать как с грудью.



ЛАТЕРАЛИЗОВАННАЯ СОСКА

- Предотвращает попадания воздуха, так как она наполнена молоком.



НАКЛОННАЯ СОСКА

- Способствует правильному положению шеи, и, вместе с тем, расслабленной и спокойной лактации.
- Помогает предотвратить отток и даже ушные инфекции.




РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОТОК

- Оптимальное количество для новорожденных.
- Ее открытие позволяет жидкости проходить в большей или меньшей степени в зависимости от силы, с которой ребенок сосет.
- Специально разработана для комбинирования кормления грудью и с бутылочки.

ПАКЕТ ДЛЯ ГРУДНОГО МОЛОКА НА МОЛНИИ

Позволяет хранить свежее сцеженное грудное молоко. Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере, его широкое основание обеспечивает необходимую устойчивость, позволяя ему стоять в вертикальном положении. Боковое отверстие позволяет легко и гигиенично наливать молоко в бутылочку, избегая проливания молока.

Со специальной зоной для записи даты и количества извлеченного молока и застёжкой-молнией, которая позволяет легко открывать и закрывать его. Пакеты предварительно стерилизованы, поэтому их не нужно предварительно мыть. Они совместимы со специальными подогревателями для бутылочек, которые позволяют нагревать пакеты для хранения грудного молока. Чтобы нагреть пакет в подогревателе для бутылочек Suavinex, сначала поместите пакет в подогреватель для бутылочек и добавьте воды до тех пор, пока уровень молока не достигнет уровня молока в пакете.

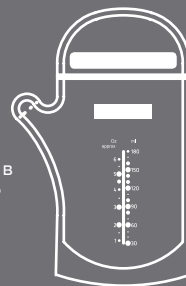


· ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ МАМЫ:

Это нормально, если молоко медленно сцеживается вначале. Часто возникает необходимость предварительно стимулировать грудь. В некоторых случаях, таких как стресс, нервность и т. д., процесс извлечения молока затрудняется. Не волнуйтесь: это может случиться, и это совершенно нормально. В этом случае, прекратите сцеживание и возобновите его в другой раз, когда Вы почувствуете себя спокойнее.

· СОДЕРЖАНИЕ

1. ДЕТАЛИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ МОЛОКООТСОСА	130
2. ДЕТАЛИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ БУТЫЛОЧКУ ZERO.ZERO™	131
3. ЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ:	131-132
3.1 ЧИСТКА МОЛОКООТСОСА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	131
3.2 ЧИСТКА МОЛОКООТСОСА ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	131
3.3 ЧИСТКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА	132
3.4 ЧИСТКА БУТЫЛОЧКИ ZERO.ZERO™ ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	132
4. СБОРКА МОЛОКООТСОСА ПОСЛЕ ЧИСТКИ	133-134
5. СЦЕЖИВАНИЕ ГРУДНОГО МОЛОКА	135-136
6. ХРАНЕНИЕ СЦЕЖЕННОГО МОЛОКА	136
7. СБОРКА БУТЫЛОЧКИ ZERO.ZERO™ ПОСЛЕ ЧИСТКИ	137
8. СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БУТЫЛОЧКИ ZERO.ZERO™	138
9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	139
9.1 БУТЫЛОЧКА ZERO.ZERO™	139
9.2 ПАКЕТ ДЛЯ ГРУДНОГО МОЛОКА С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ	139
10. ХРАНЕНИЕ ГРУДНОГО МОЛОКА	139
11. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОЛОКООТСОСА	140

1. ДЕТАЛИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ МОЛОКООТСОСА

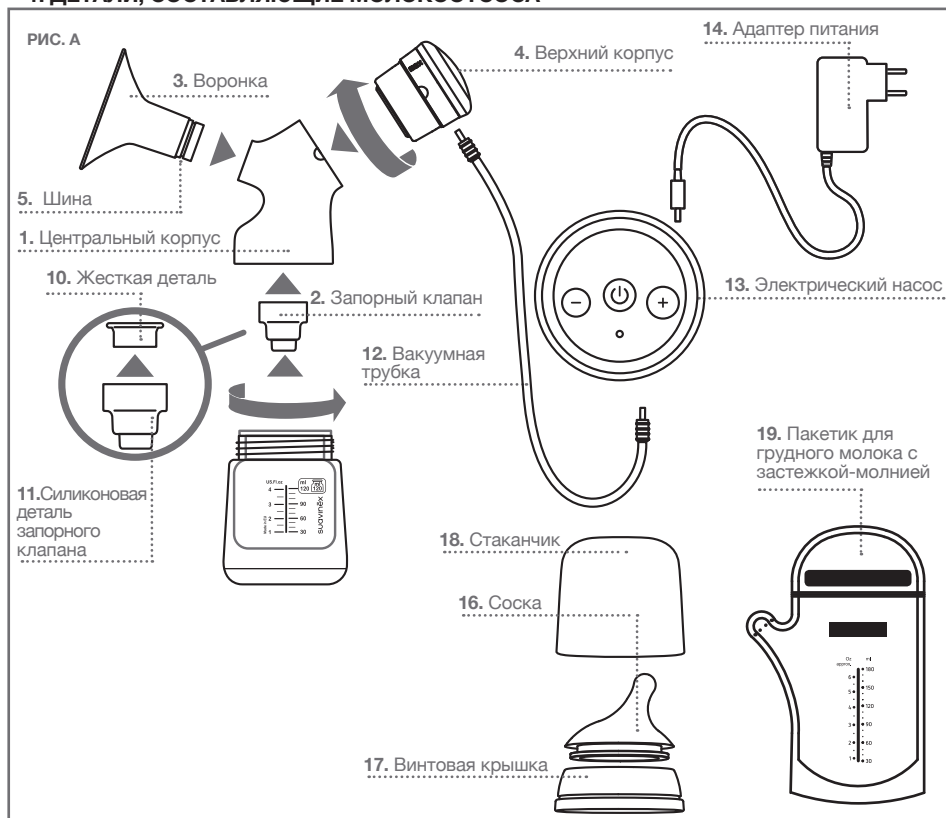

2. ДЕТАЛИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ БУТЫЛОЧКУ ZERO.ZERO™



3. ЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

3.1. ЧИСТКА МОЛОКООТСОСА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Все детали* молокоотсоса, через которые течет молоко, должны быть стерилизованы: центральный корпус (1), воронка (3), запорный клапан (2).

*Кроме пакетиков, которые предварительно стерилизуются и предназначены для одного использования.

Используйте один из следующих способов стерилизации:

- а) Стерилизация кипятком:** залейте и прокипятите детали молокоотсоса в воде 3-5 минут.
- б) Стерилизация паром:** вы можете поместить детали в стерилизатор для микроволновой печи или в электрический стерилизатор, следуя рекомендациям производителя. Мы рекомендуем использовать стерилизаторы Suavinex.

3.2. ЧИСТКА МОЛОКООТСОСА ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Мыть с мягким мылом и водой все компоненты, которые были в контакте с молоком.
- Не используйте абразивные или агрессивные продукты, такие как отбеливатель, растворители и т.п., так как они могут повредить изделие.
- Рекомендуется протереть влажной тканью верхнюю часть аппарата, вакуумную трубку, электрический насос и адаптер питания, если они находились в контакте с молоком.
- Можно мыть в посудомоечной машине только те части, которые были в контакте с молоком. Этот метод очистки ускоряет износ продукта.
- Очень важно, чтобы молокоотсос полностью высох, прежде чем снова собрать его. Таким образом, можно избежать развития болезнетворных микроорганизмов, таких как плесени.

· ВАЖНО:

- Никогда не наливайте воду в вакуумную трубку, как можно повредить прибор.

· ПРИМЕЧАНИЕ:

Не нужно снимать верхний корпус (5) для стерилизации, так как он, как правило, не соприкасается с молоком. Вы можете протереть эту деталь влажной тканью. Если вы не разбираете его, убедитесь, что в верхней части корпуса не осталась вода. Следуйте инструкциям в пункте 3.3., где мы объясним, как его разобрать.

3.3. ЧИСТКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА

- 1- Отделите верхний корпус (4) от центрального корпуса (1), осторожно открутив их против часовой стрелки.
- 2- После разъединения верхнего корпуса (4) от центрального корпуса (1), снимите мембрану (9), сильно натянув ее, чтобы отделить от соединительной детали (6).
- 3- Сильно потяните регулятор (9) чтобы отделить его от соединительной детали (6).
- 4- Потяните силиконовый клапан (7).
- 5- Все части теперь разделены и готовы для чистки / стерилизации. Вымойте их с мылом и водой или подвергните стерилизации.


При **сборке** осуществите действия в обратном порядке. Обратите внимание на следующее:

- 1- Поместите силиконовый клапан (7) в прямоугольное отверстие внутреннего круга регулятора (8), с помощью мягкого надавливания.
- 2- При соединении регулятора (8) с соединительной частью (6) будет легче, если вы поместите внутренний выступ (8.1) регулятора (8) на прямоугольное отверстие, расположенное на внешней стороне соединительной детали (6)
- 3- Убедитесь, что отметка (полоса) интенсивности вакуума регулятора (8) расположена между позициями MIN и MAX соединительной детали (6).
- 4- Поместите мембрану (9) в круглое отверстие соединительной детали (6)

РИС. В



FIG C

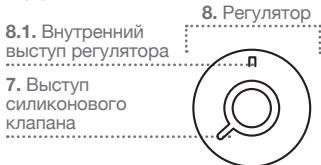

3.4. ЧИСТКА БУТЫЛОЧКИ ZERO.ZERO™ ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

-Перед каждым использованием, а также перед первым, тщательно мойте соску, компоненты бутылочки и отдельно стерилизуйте их.

-Отделяйте все части бутылочки перед стерилизацией.

-Чистка бутылочки: используйте теплый мыльный раствор или вымойте в посудомоечной машине. Не используйте дезинфицирующие средства, содержащие спирт.

-Чистка силиконового пакетика: используйте теплый мыльный раствор. Рекомендуем вывернуть на себя для большего комфорта. После очистки верните его в исходное положение (блестящая часть внутри и THIS SIDE OUT снаружи) и дайте ему высохнуть.

-Мы не рекомендуем использовать щетку для чистки бутылок для очистки силиконового мешка, поскольку он мягкий и деформируется при обработке.

-Стерилизовать необходимо только те детали, которые контактируют с молоком.

-Рекомендованные методы стерилизации:

- a) В кипящей воде в течение 5 минут, погрузив силиконовый пакетик полностью под воду. Этот метод необходимо использовать перед первым использованием для обеспечения гигиены. Перед использованием дайте всем компонентам остыть. Удалите всю воду, которая может оставаться внутри соски, чтобы гарантировать стерильность.

- b) Стерилизовать с помощью микроволновой печи/пара, следуя инструкциям производителя стерилизатора.

- в) Система холодной стерилизации.

-Не стерилизовать в скороварках или автоклавах.

-Не превышайте рекомендованное время и температуру стерилизации, так как бутылочка может быть повреждена.

-Не загружайте в стерилизатор больше количество бутылочек, чем рекомендовано производителем, и не применяйте силу после того, как они были помещены внутрь.

-Неправильные методы очистки, которые могут повредить изделие:

- a) Агрессивные растворы, такие как моющие средства и растворители.

- b) Дезинфицирующие средства, содержащие спирт.

- в) Антибактериальные чистящие средства.


- Мойте в посудомоечной машине только верхний поддон и при температуре не выше 60°C

• ПРИМЕЧАНИЕ:

Если Вы используете любую другую бутылочку Suavinex, следуйте инструкции по очистке, предоставленной производителем.

4. СБОРКА МОЛОКООТСОСА ПОСЛЕ ЧИСТКИ

- 1- Вставьте воронку (3), надавливая на центральный корпус (1) при помощи шины (5). Эта шина (5) обеспечивает полностью герметическое закрытие.
- 2- Вставьте жесткую деталь (10) внутрь мягкой силиконовой детали (11) до упора. Имейте в виду, что отверстие в форме звезды детали (10) должны быть покрыто подвижной силиконовой мембраной с нижней стороны детали (11). Таким образом, образуется запорный клапан (2).
- 3- Вставьте запорный клапан (2) во внутреннюю часть центрального корпуса (1).
- 4- Прикрутите бутылочку к центральному корпусу (1) до надежного закрытия.

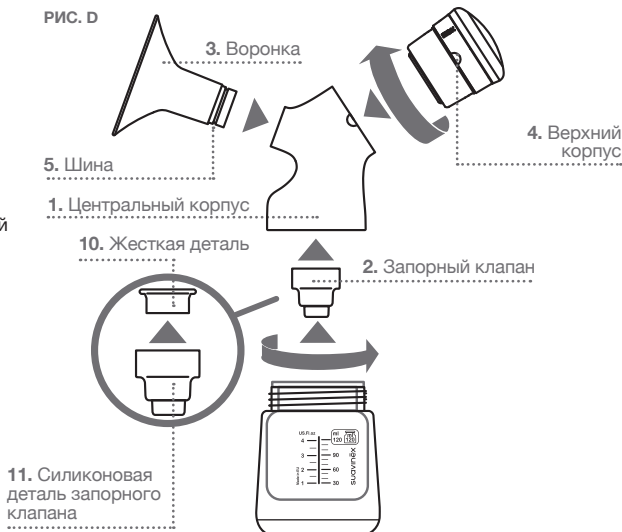

• ПРИМЕЧАНИЕ:


Вы также можете использовать бутылочку Suavinex (не входит в комплект) для сцеживания молока. Прикрутите бутылочку прямо к центральному корпусу.

- 5- Прикрутите верхний корпус (4) к центральному корпусу (1) по часовой стрелке до тех пор, пока отметка в форме полукруга обеих деталей образует круг, и прозвучит щелчок.




6- Подключите электрический насос (13) к верхнему корпусу (4) через вакуумную трубку (12).

РИС. F

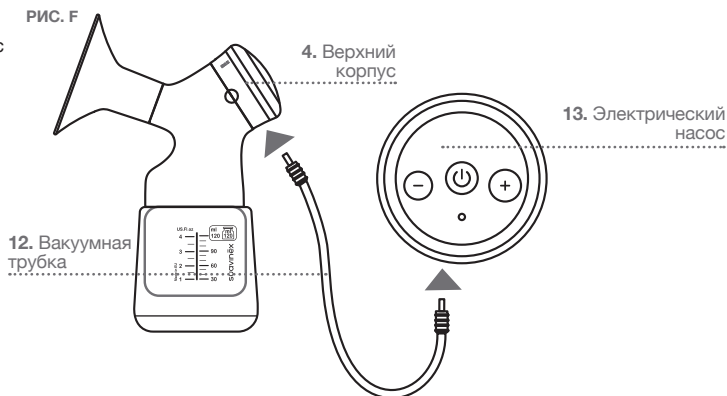

7- Подключите насос (13) к электрической сети через адаптер питания (14), или снимите крышку батарейного отсека, и вставьте 4 батарейки AA (1,5 В) в указанное положение. В верхней части батарейного отсека есть зажим, чтобы повесить насос на ремешок (20)

FIG G

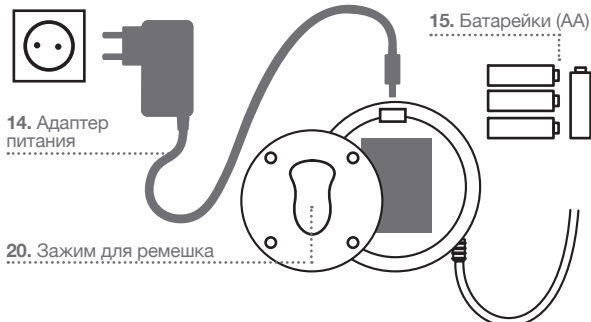


• ПРИМЕЧАНИЕ:

Сборка имеет большое значение для надлежащего функционирования молокоотсоса. Убедитесь, что все части идеально подогнаны друг к другу. Плохое соединение может привести к утечке воздуха и препятствовать возникновению вакуума. Если молокоотсос не образует вакуум, то молоко не течет. Обратите особое внимание на правильность сборки запорного клапана (2), воронки (3), вакуумной трубки (12) и, в особенности, верхнего корпуса (4).

5. СЦЕЖИВАНИЕ ГРУДНОГО МОЛОКА

После того, как аппарат находится в чистом и сухом состоянии, и все его части собраны правильно, можно приступить к сцеживанию молока, подключив молокоотсос к сети, или вставив батарейки. Рекомендуется принять в комфортную и расслабленную позу.

РИС. Н

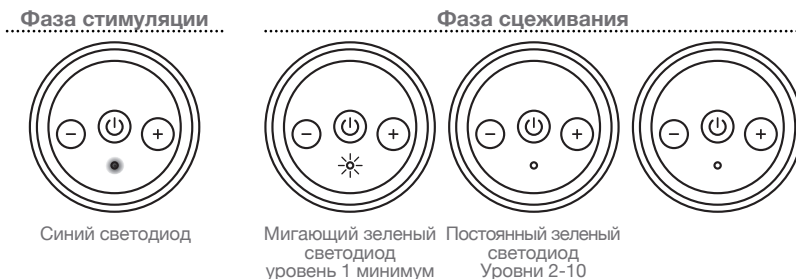

Процесс извлечения молока включает в себя **2 этапа** (РИС. Н):

1- Фаза стимуляции: нежное массирование груди до тех пор, пока молоко не начинает течь наружу (синий светодиод).

2- Фаза сцеживания: После того, как молоко начинает течь, этот процесс поддерживается постоянно, имитируя ритм сосания ребенка (зеленый светодиод).

Светодиодный свет электрического насоса поможет Вам узнать, на какой стадии или уровне сцеживания Вы находитесь.

Электрический насос имеет 11 уровней сцеживания: уровень 1- самый низкий, уровень 11 - максимальный.

1- Для правильной работы установите молокоотсос молока вертикально.


2- Приложите воронку как можно плотнее к груди так, чтобы не было зазоров, и чтобы установился вакуум (РИС. I).

3- Поместите регулятор верхней корпуса аппарата в промежуточное положение. Отрегулируйте до минимума или максимума в зависимости от ваших потребностей, таким образом, Вы сможете контролировать интенсивность.

РИС. I



РИС. J

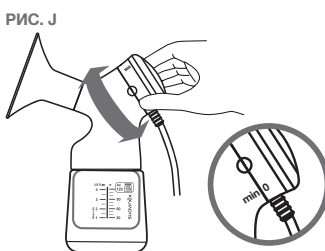

4- Запустите электронасос, нажав и удерживая кнопку питания (около 3 секунд) (РИС. K1). Загорится синий светодиод (РИС. K2).

РИС. K1


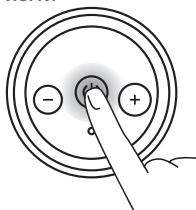


РИС. K2

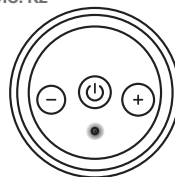

· ВАЖНО:

Никогда не кладите аппарат во время сцеживания молока, чтобы не дать молоку течь обратно к верхнему корпусу прибора (4) и по вакуумной трубке (12). Таким образом, аппарат может быть поврежден.

СИНИЙ ЦВЕТ: Фаза стимуляции (массаж)

1- При включении молокоотсоса начинается фаза стимуляции. Она длится 2 минуты, после чего, насос переходит в фазу сцеживания при повторном нажатии кнопки пуска.

2- Если вам нужно больше времени для массажа, то после окончания фазы стимуляции, сделайте 2 коротких нажатия на кнопку питания, и он начнется снова.

ЗЕЛЕНый ЦВЕТ: Фаза сцеживания

3- После того, как молоко начинает течь, нажмите кнопку питания (короткое нажатие), (РИС. К1). Это позволит закончить этап стимуляции и начать этап сцеживания (светодиод будет меняться от синего до зеленого мигающего). Эта фаза начинается с быстрой частоты всасывания (уровень 1).

4- Вы можете увеличить или уменьшить частоту всасывания с помощью кнопок (+/-), выбрав наиболее подходящий ритм (РИС. L3). Зеленый светодиод продолжает мигать постоянным светом (уровень 2 до 10) до максимальной скорости, на которой он снова станет мигать, чтобы показать свой максимальный уровень (РИС. L4 - L5).

5- Вы можете отрегулировать интенсивность вакуума (или силы всасывания) регулятором на верхнем корпусе (5), до наиболее удобного и соответствующего положения (РИС. J).

РИС. L3



РИС. L4


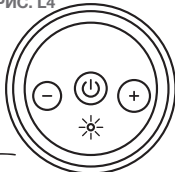


РИС. L5

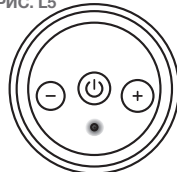

6. ХРАНЕНИЕ СЦЕЖЕННОГО МОЛОКА

После сцеживания молока, храните его следующим образом:

Если Вы сцедили молоко прямо в бутылочку Suavinex и хотите хранить его в бутылочке:

1- Отвинтите бутылочку от центрального корпуса молокоотсоса (РИС. O).

2- Поместите белую крышку между

бутылочкой и наверх, и закрутите ее до упора (РИС. P).

3- Вы можете хранить молоко в холодильнике или морозильной камере.

РИС. O

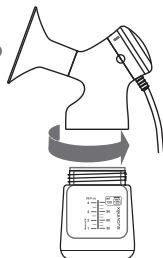


РИС. P




Если Вы сцедили молоко прямо в бутылочку Suavinex и хотите хранить его в пакетике для грудного молока с застежкой-молнией:

1- Отвинтите бутылочку от центрального корпуса молокоотсоса (РИС. O).

2- Очень осторожно вылейте сцеженное молоко в пакетик. (РИС. Q)

РИС. Q

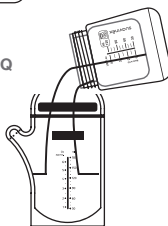

• ПРИМЕЧАНИЯ:


- При кормлении ребенка сначала используйте молоко, которое хранилось дольше всего. Чтобы узнать, какой пакетик для хранения использовать, мы рекомендуем вам записать на нем дату сцеживания.
- Пакетики для грудного молока и бутылочки совместимы с подогревателем бутылочек Suavinex.

7. СБОРКА БУТЫЛОЧКИ ZERO.ZERO™ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ

1. Вставьте основание соски (b) через верхнюю часть закручивающейся крышки (c), вставив нижний край соски внутрь самой крышки.



2. Обратите внимание на внутреннюю часть закручивающейся крышки (c): соска (b) должна быть полностью развернута в форме круга.

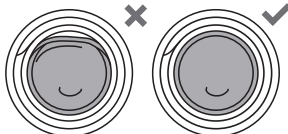


3. Основание бутылочки (g) можно снять. Это дает достаточно места для размещения силиконового пакета (e) внутри бутылочки (f).



4. Сложите силиконовый пакет (e) пополам и вставьте его в бутылочку. Вы можете вставить его сверху или снизу, в зависимости от того, как Вам удобнее. СМ. ПРИМЕЧАНИЕ

СВЕРХУ


СНИЗУ

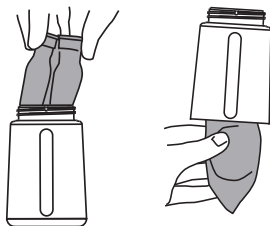

5. Хорошо поддерживая горлышко пакета (e) на горлышке бутылочки (f), убедитесь, что пакет не помят.



6. Поместите основание (g) на бутылочку (f) и ввинтите соску с закручивающейся крышкой в бутылочку-пакетик-основание. Перед наполнением пакетика для молока важно установить основание (g), чтобы молоко не пролилось, а также чтобы пакет не касался его во время кормления, что нарушит его правильную работу.

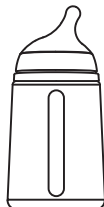

7. Закройте внутреннюю крышку (d), чтобы жидкость не вытекла во время транспортировки или при встряхивании бутылочки при приготовлении молочной смеси. Поместите ее поверх пакетика (e) перед тем, как прикрепить закручивающуюся крышку (c) бутылочки. Правильное положение внутренней крышки (d) показано на рисунке, с логотипом Suavinex наверху.




• ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы ранее переворачивали пакетик, чтобы постирать его, имейте в виду, что Вы должны вернуть его в исходное положение: гравировка THIS SIDE OUT должна быть снаружи, а блестящая часть пакета - внутри.

8. СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БУТЫЛОЧКИ ZERO.ZERO™

1- Наполните молоком только после того, как силиконовый пакет (е) будет установлен внутри бутылочки (f).


2- Чтобы кормить ребенка, соска (b) должна быть вставлен в рот в следующем положении:

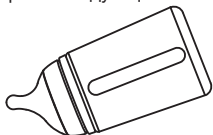


4- Для большего комфорта во время кормления мы рекомендуем брать бутылочку за центральную часть.



6- Если Вы хотите измерить объем жидкости, оставшейся в сумке до того, как ребенок закончил кормление, необходимо немного открутить винт на бутылочке, чтобы сложенный пакет снова развернулся.

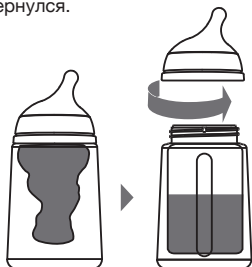

3- Короткая часть соски от кончика до низа должна находиться в верхней зоне; самая длинная часть должна быть внизу.

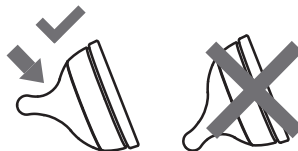

5- Силиконовый пакет (е) морщится во время сосания ребенка - это нормально, это часть функционирования всей системы.



-Пищевые красители могут окрасить какой-либо компонент. После каждого использования тщательно промывайте водой.

-Не хранить во влажных местах или при высоких температурах.

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МИКРОВОЛННОЙ ПЕЧИ

-Перед нагреванием снимите крышку, винт и соску с бутылочку.

-При нагревании в микроволновой печи убедитесь, что в пакетике есть жидкость,

-Будьте особенно осторожны при приготовлении в микроволновой печи. Всегда помешивайте нагретую пищу, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла, и проверяйте температуру перед кормлением.

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В НАГРЕВАТЕЛЕ ДЛЯ БУТЫЛОЧЕК

-Чтобы нагреть бутылочку Zero.Zero™, заранее снимите основание бутылки и всегда используйте 80 мл воды.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

9.1 БУТЫЛОЧКА ZERO.ZERO™ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО МАЛЫША ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Непрерывное и продолжительное всасывание жидкости может вызвать кариес. Кариес у детей может возникнуть даже при употреблении несладких жидкостей. Это может произойти, если ребенку разрешено использовать бутылочку в течение длительного времени в течение дня и, особенно, ночью, когда выделение слюны снижено, или если она используется в качестве соски-пустышки.
- Всегда проверяйте температуру пищи перед подачей, чтобы ребенок не обжегся, если еда горячая.
- Утилизируйте при первых признаках повреждения или поломки. Внимательно осматривайте соску/трубочку перед каждым использованием и потяните ее во всех направлениях, чтобы избежать риска удушья.
- Храните все неиспользуемые компоненты в недоступном для детей месте. Чтобы ребенок не задохнулся, или не зажал пальцы этими компонентами.
- Никогда не прикрепляйте к ней шнурки, ленты, завязки или свободные части одежды. Ваш ребенок может задушить себя. Шнурок может обернуться вокруг шеи ребенка.
- Никогда не используйте соску в качестве соски-пустышки. Это использование может привести к образованию кариеса.
- Всегда используйте этот продукт под присмотром взрослых. Оставление ребенка с бутылочками без присмотра может привести к несчастным случаям: из-за падения или разборки изделия.
- Не оставляйте соску под прямыми солнечными лучами или другими источниками тепла, а также не оставляйте ее погруженной в стерилизующий раствор дольше рекомендованного времени. Все это может повредить соску.
- Не позволяйте ребенку бегать или ходить во время питья.
- Мойте перед каждым использованием.

9.2 ПАКЕТИК ДЛЯ ГРУДНОГО МОЛОКА С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ:

- Одноразовый продукт.
- Используйте исключительно с грудным молоком. Не используйте с молочными смесями.
- Шкала является приблизительной и во многом зависит от формы использования пакета и может иметь разницу до 15%.

10. ХРАНЕНИЕ ГРУДНОГО МОЛОКА

Храните грудное молоко в холодильнике или морозильной камере, внутри контейнера, одноразового герметичного пакетика или бутылочке.

- Хранение в **холодильнике**: от 3 до 4 дней при 4 ° C.
- Хранение в **морозильной камере**: до 6 месяцев при -18 ° C.

• ВАЖНО:

- Всегда пишите дату сцеживания на контейнере для хранения.
- Никогда не используйте микроволновую печь, чтобы разморозить молоко, она не подходит для грудного молока.
- После оттаивания молоко не замораживать снова.

11. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОЛОКООТСОСА

• ПРИМЕЧАНИЕ:

Сборка имеет большое значение для надлежащего функционирования молокоотсоса. Убедитесь, что все части идеально подогнаны друг к другу. Наиболее важные соединения:

- центральной корпус (1) с запорным клапаном (2)
- жесткая деталь (10) с мягкой деталью (11)
- воронка (3) с центральным корпусом (1)
- верхний корпус (4) с центральным корпусом (1)
- вакуумная трубка (12) с верхним корпусом (4) и электрическим насосом (13)
- мембрана (9) с соединительной деталью (6)
- воронка с шиной (3 + 5) с центральным корпусом (1)

НеисправностьОтсутствие вытяжки молокоотсоса

ПричинаНеправильная сборка.

Способ действияУбедитесь, что все детали плотно и правильно собраны, удостоверьтесь в отсутствии возможности просачивания воздуха, через любую деталь (запорный клапан (2), воронка (3), мембрана (9), вакуумная трубка (12)) и, особенно, правильно ли собраны детали верхнего корпуса аппарата.

НеисправностьДискомфорт в груди во время сцеживания

Причина 1Чрезмерная мощность всасывания.

Способ действия 1Отрегулируйте уровень интенсивности (или силы всасывания) с помощью регулятора (8) на верхнем корпусе аппарата (4).

Причина 2Слишком быстрый цикл всасывания.

Способ действия 2Попробуйте выбрать более медленную частоту всасывания при помощи регулятора частоты всасывания электрического насоса (13).

НеисправностьМолокоотсос не включается

ПричинаОтсутствие тока

Способ действияУбедитесь, что сетевой адаптер (14) подключен правильно. Убедитесь, что батарейки (15) правильно установлены и заряжены

Если у вас есть сомнения, мы с радостью вам поможем по нашему телефону службы по работе клиентам, который вы найдете на следующей странице: www.suavinex.com/en/about-suavinex/our-family-in-the-world.html или по нашей электронной почте: suavinex@suavinex.com

suavinēx

LABORATORIOS SUAVINEX, S.A

C/ del Marco parcela R88

Polígono Las Atalayas 03114 ALICANTE · ESPAÑA/SPAIN

www.suavinex.com · suavinex@suavinex.com

C.I.F: A-03123122 · R.S.I: nº3902245/A