



## Parce Dentes

Качественные инструменты и материалы для имплантации и хирургической стоматологии


Москва, Дмитровское шоссе 157  
строение 9, офис 9299

тел. +7 (926) 790-13-00

<https://parce-dentes.com/>

## Скребок костный стоматологический MICROSS

### Инструкция по применению

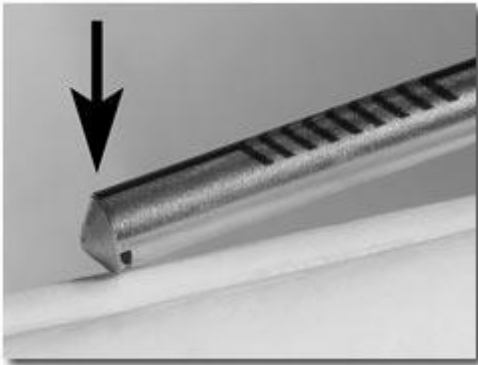


Держать устройство необходимо так, чтобы маркер на поверхности катетера был обращен в сторону врача-хирурга.



Костная ткань собирается посредством надавливания внешнего интерфейса инструмента на костную поверхность и извлечением его назад.



Кость может собираться как с плоских поверхностей, так и из полостей (выемок). Угол работы варьируется от  $5^{\circ}$  до  $50^{\circ}$ .

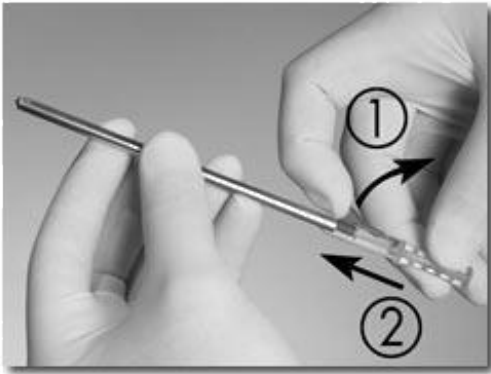

Изменяя угол работы и давление на инструмент, можно изменять количество и консистенцию собираемой кости



Костный скребок Micross может вмещать объем до 0,25 см<sup>3</sup>.



Чтобы достать собранную кость, необходимо положить инструмент в стерильную чашу (емкость), затем освободить рычаг и плавно двигать устройство назад до полного открытия.

Используйте только стерильные инструменты для извлечения аутогенного костного материала из отсека.



Для того чтобы собрать больше костной ткани, нужно привести рукоятку в исходное положение и сцепить рычаг.