

Табурет для ванны

Настоящее руководство по эксплуатации на табурет для ванны (далее табурет или изделие), предназначено для ознакомления с работой, и содержит сведения по использованию, регламенту работы и технические характеристики.

1. ВВЕДЕНИЕ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте ее во время использования изделия.
Сохраните ее для получения необходимой информации в будущем.
Не используйте табурет не ознакомившись с Инструкцией. Не используйте табурет, если на нем видны видимые повреждения.
Не пытайтесь внести изменения в конструкцию изделия.
ТМ «Аортис» гарантирует использование высококачественных материалов и контроль производства на всех его стадиях.
Табурет рекомендован для применения в медицинских учреждениях и дома.
Используется для повышения уровня комфорта во время проведения гигиенических процедур.
Табурет разработан для максимального удобства и безопасности пользователя. Предназначен для использования в жилых помещениях.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом использования табуреты убедитесь, что она находится в надлежащем состоянии и готова к эксплуатации. Регулярно проверяйте общее техническое состояние.

1. УСТАНОВЛИВАЙТЕ табурет на ровную горизонтальную поверхность.
 2. ПРОВЕРЯЙТЕ надлежащее качество табурета перед каждым использованием.
 3. Если обнаружена неисправность, то НЕ проводите ремонт самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр или к продавцу для получения инструкций.
 4. НЕ наклоняйте табурет.
 5. В случае использования изделия разными пациентами РЕКОМЕНДУЕТСЯ тщательно мыть и дезинфицировать табурет, чтобы избежать инфекций.
 6. Пользователям с ограниченными физическими возможностями РЕКОМЕНДУЕТСЯ обращаться за помощью к ассистенту.
- ТМ «Аортис» не гарантирует безопасность пользователя и правильное функционирование табурета при условии, если любой из оригинальных компонентов был изменен или заменен на неоригинальный.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|------------------------------|-------------|
| Материал | Пластик |
| Размер изделия (ДхШхВ), см | 34х34х35-48 |
| Размеры сиденья (ДиамхВ), см | 30х35-48 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Вес, кг | 1,65 |

4. ОПИСАНИЕ

Изделие оснащено резиновыми наконечниками против скольжения,
Ножки выполнены из металла и имеют полимерное покрытие. Сиденье изделия круглой формы с дополнительной накладкой, которая проворачивается на 360 градусов вокруг своей оси, изготовлено из особо прочного, легкомоющегося пластика, нейтрального к воздействию воды.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Проверяйте надлежащее качество табурета перед каждым использованием. Если изделие используется не регулярно, то осматривайте его минимум раз в год. В случае поломки или неисправности, повреждений одного или нескольких деталей, не используйте изделие.
Поверхность табурета обрабатывайте дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.
Всегда держите табурет в чистоте для использования в течение длительного срока.
Очищайте с помощью воды и моющих средств. Не используйте растворители и абразивные средства.
Протирайте табурет сухой тряпкой после каждого использования.

6. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ТМ «АОРТИС» гарантирует отсутствие заводских дефектов и работу изделия в течение гарантийного средства 6 месяцев с даты покупки при соблюдении правил эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции.


1. Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока.
2. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - нарушение правил эксплуатации, изложенных в Инструкции;
 - при наличии признаков постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта изделия);
 - если изделие использовалось не по назначению.
3. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения или повреждения вследствие транспортировки;
 - повреждения, вызванные попаданием к изделию посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п..
4. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 (четырнадцати) дней, не считая дня покупки в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

Обмен товара надлежащего качества производится при условии, если он не использовался и, если сохранен его товарный вид (упакован в заводскую упаковку), потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

ВНИМАНИЕ! Артикул, технические характеристики, цвет, внешний вид, комплектация изделий могут быть изменены производителем без предупреждения.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

Положите сиденье стороной с отверстиями с резьбой вверх, прикрепите к сиденью раму с помощью крепежного комплекта. Прикрепите ножки с резиновыми наконечниками к раме с сиденьем. Изделие готово к эксплуатации.

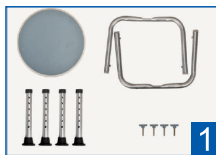

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Сиденье
2. Удлинительный опор (4 шт.)
3. Опоры сиденья (2 шт.)
4. Крепежный комплект
5. Паспорт и Инструкция по эксплуатации

8. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Изготовитель: ZHONGSHAN NEWBEST IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED

Место нахождения: CHINA, No.8, YONGXING NORTH ROAD YONGXING INDUSTRIAL AREA HENGLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG

Импортер: ООО "АОРТИС"

107497, Россия, Москва, ш. Щёлковское, д. 79, к.1, кв. 444

