


ООО «МалидиМед»

**Модуль подогрева автоматический для
алкотестера Динго В-02 МПМЛ-01**

Руководство по
эксплуатации

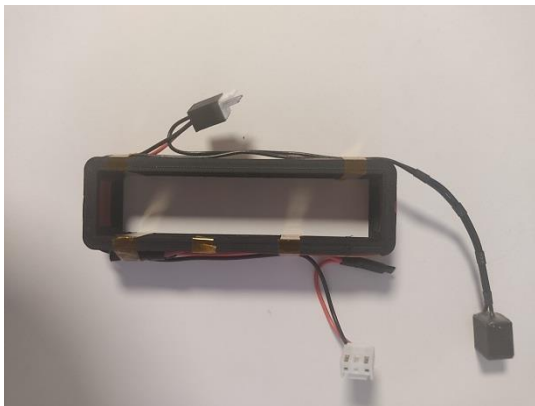

www.алкотестер.бел

2023

1. Описание

Модуль подогрева устанавливается в корпус алкотестера Динго В-02 и подключается к штатной цепи питания без использования инструментов и какой-либо переделки цепи питания алкотестера. Обеспечивает автоматическое поддержание рабочей температуры сенсорного блока алкотестера. Подогрев включается и выключается в зависимости от температуры окружающей среды.

Внешний вид и описание основных компонентов изделия приведены на рис.1

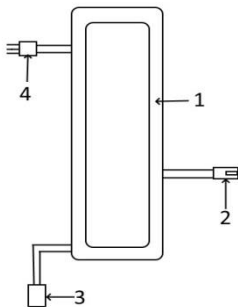


Рис.1 Внешний вид Модуля подогрева и описание основных элементов:

1. Корпус нагревательного элемента
2. Разъем питания
3. Термостат
4. Разъем питания

2. Комплект поставки

Наименование комплектующих	Кол-во
Модуль подогрева автоматический для алкотестера Динго В-02 МПМЛ-01	1
Руководство по эксплуатации	1

3. Монтаж

3.1. Достаньте Модуль подогрева автоматический для алкотестера Динго В-02 МПМЛ-01. Закрепите на сенсорный блок.

3.2. Подключите разъем 2 (рис.1) к штатной колодке питания алкотестера Динго В-02.

3.3. Подключите разъем 4 (рис.1) в штатную цепь питания.

3.4. Установите провод термостата 3 (рис.1) в прорезь алкотестера Динго В-02.

Видео инструкция по установке:

<https://youtu.be/0VXFNrCqYrI>

4. Спецификация

Диапазон рабочей температуры, °С:

Включение при $+13\text{C} \pm 2\text{C}$;

Выключение при $+15\text{C} \pm 2\text{C}$.

Рабочее напряжение 13.8В постоянный, потребляемый ток 0.18А.

Максимальная температура нагрева $+45\text{C}$ при температуре окружающей среды $+20$.

5. Условия гарантии

Производитель гарантирует, что приобретенный Вами Модуль подогрева не имеет производственных дефектов в части материалов и комплектующих в момент продажи и обязуется произвести бесплатный ремонт вышедших из строя элементов в течение всего срока действия гарантии.

Гарантийное обслуживание изделия осуществляется в специализированных сервисных центрах (СЦ), уполномоченных на проведение таких процедур.

Доставка (отправка) модуля подогрева в СЦ и получение из СЦ осуществляются силами и за счет средств покупателя. Срок гарантии: 5 (пять) лет.

Изделие принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии руководства по эксплуатации с указанием, даты продажи и печати торгующей организации.

Производитель оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании в следующих случаях:

1. Утерян или неправильно заполнен гарантийный талон либо Руководство по эксплуатации, из-за чего невозможно установить дату продажи модуля подогрева.

2. Модуль подогрева монтировался или использовался с нарушением правил монтажа и эксплуатации.

3. Модуль подогрева имеет следы механических повреждений, вызванных ударами, падением либо попытками вскрытия.

4. Модуль подогрева имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модуль подогрева автоматический для алкотестера Динго В-02
МПМЛ-01

Производитель: ООО «МалидиМед»

211415, Витебская область, г.Полоцк, проспект Франциска
Скорины, д.14, пом.32, к.3

Р/с: BY87 ALFA 3012 2A26 2000 1027 0000

в ЗАО «Альфа-Банк», БИК: ALFABY2X.

УНП: 391961785

Тел. +375-44-720-09-31

Дата производства:	
Дата продажи:	

Подпись продавца

м.п.