

Техника работы с люксаторами

Luxator ®

Периотом

L1S	1 мм
L2S	2 мм
L3C	3 мм
L3S	3 мм
L3CA	3 мм
L3IC	1 мм
L5C	5 мм
L5S	5 мм

Короткий периотом

S2S	2 мм
S3C	3 мм
S3S	3 мм
S3CA	3 мм
S5S	3 мм

Элеватор Forte.

F25	2,50 мм
F32	3,25 мм
F40	4,00 мм

Периотом с двойной кромкой.

DE3	3/1,5 мм
DE5	5/3 мм

Благодарим вас за выбор Luxator ®. Гарантийные обязательства не распространяются на инструменты с повреждением вершины в результате неправильного обращения.

Luxator ® - инструменты для удаления зубов.

Периотом.

Короткий периотом.

Периотом с двойной кромкой.

Элеватор Forte.

**А. Техника использования инструментов Luxator ® : Периотома, короткого периотома и периотома с двойной кромкой.
(1S, 2S, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, DE3, DE5).**

Замечание.

Концы инструментов Luxator ® периотом, короткий периотом и периотом с двойной кромкой являются очень тонкими и острыми, и, работая с чрезмерным усилием, их можно сломать. Концы этих инструментов не предназначены для работы с большими усилиями.

Эргономичный дизайн ручки инструмента обеспечивает оптимальную тактильную чувствительность и возможность контроля. Поместите свой указательный палец вдоль оси лезвия, для того чтобы отметить глубину нужного проникновения. Указательный палец будет служить ограничительным упором. Поместите конец инструмента симметрично оси в периодонтальное пространство.

Особые ситуации/рекомендации.

- Обычно кортикальная кость имеет бóльшую толщину на щечной стороне альвеолярного отростка. Поэтому Люксаторы сначала используют на небной/язычной стороне. Это позволяет сжать альвеолярную кость и создать место для перемещения корня в небном/язычном направлении после внедрения инструмента с щечной стороны.
- При удалении верхних латеральных резцов инструмент внедряют параллельно наклону небного аспекта.

Кончик инструмента осторожно вводят в десневую лунку легким крутящим движением. Тонкий и острый конец инструмента срезает волокна периодонтальной связки, одновременно прижимая кость и аккуратно поднимая зуб из лунки.

Инструментом работают на глубину до двух третей длины корня, придерживая инструмент ближе к стенкам зубной лунки. Избегайте затрагивания корня.

Если корень остается устойчивым, повторите процедуру с другой стороны.

В. Техника использования инструментов Luxator ® Forte Elevator (F25, F32, F40).

Эти инструменты используют, если необходимо или желательно применить большое усилие, например, для поднятия.

Особые ситуации/Рекомендации для техники А и техники В.

- При удалении нижних зубов свободной рукой удерживайте нижнюю челюсть для того, чтобы избежать избыточного давления на височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС).
- Многокорневые зубы перед люксацией следует распилить на секции.
- Для снижения риска травмы и повреждения кости, внимательно изучите рентгенограмму удаляемого зуба для установления ориентации зуба по отношению к костным структурам пациента. В частности оцените:
 - Расположения верхнечелюстной пазухи по отношению к зубу;
 - 2 и 3 моляров в верхней челюсти и оценки риска перелома бугра верхней челюсти;
 - Расположения нервов и кровеносных сосудов в нижней челюсти.

Инструкции для пользователей.

Намеченное использование:

Инструменты Luxator ® специально предназначены для удаления зубов.

Заточка инструмента.

Для получения оптимальных результатов, затачивайте инструмент регулярно на точильном бруске Luxator ®. Инструмент затачивают после тщательной очистки от волокон перед стерилизацией.

Стерилизация.

В автоклаве. Сухим теплом до максимальной температуры 180°C. В химическом стерилизаторе.

Материал.

Нержавеющая сталь. Полиамид РА 6.6

Периотом, короткий периотом (ручка на 10 мм короче, чем у обычного периотома)

Замечание.

L-1S*	Наделен свойствами периотома	Периотом/Нож для разрезания
L2S, S2S	Для апикальных и/или проксимальных областей	периодонтальной связки
L3C, S3C	Общего назначения/ стартовый инструмент	
L3S, S3S, L5S, S5S	Для проксимальных областей	
L3CA, S3CA	Для язычных и/или дистальных областей корней моляров	
L3IC	Общего назначения, язычные, дистальные области	
L5C	Корни крупных моляров, инструмент общего назначения	

Периотом с двойной кромкой

DE3*, DES	Для использования при глубоких переломах или кариозных поражениях корней	Люксатор в сочетании с характеристиками периотома
------------------	--	---

Элеватор Forte

F25, F32, F40	Для поднятия.
----------------------	---------------

*) Очень острый и хрупкий инструмент. Использовать с осторожностью!