


Great White™ Ultra



Препарирование под коронки быстро, чисто и ультра эффективно

«Great White™ Ultra» это инновационный твердосплавный инструмент для препарирования под коронки. Он был специально разработан в качестве альтернативы алмазным инструментам и препарирует гораздо быстрее, экономя рабочее время. Усиленная шейка и зубчатые режущие грани позаботятся о быстрой и одновременно чистой обработке твердых тканей.

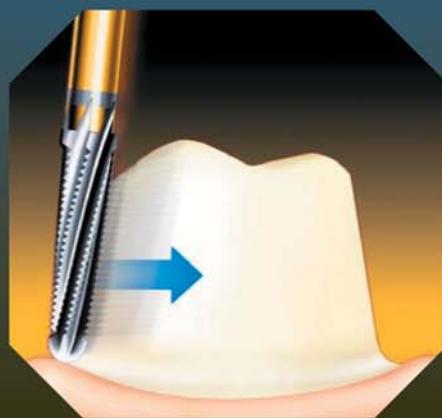

Серия инструментов GW Ultra 856 подходит для препарирования под мостовидные протезы и коронки с рациональным полукруглым уступом.

Благодаря особой конструкции возникает осевая шероховатость культи, которая улучшает ретенцию коронки. Закругленная торцевая поверхность, лишенная горизонтальных насечек, специально разработана для формирования четкого, выполненного уступа во время основного препарирования. В отличие от многих алмазных инструментов боры серии «Great White™ Ultra» быстро и эффективно удаляют стружки твердых тканей, благодаря наличию спирально закрученных граней. Это также касается препарирования амальгамы и других сложно обрабатываемых материалов. Имеются в продаже инструменты 12 форм и размеров, позволяющих решить любую врачебную задачу.



Набор «Great White™ Ultra» для препарирования под коронки и мостовидные протезы, вкладки и накладки.

Инструменты «Great White™ Ultra»


- препарируют эмаль быстро и равномерно
- быстро и эффективно удаляют любые объемы – независимо от реставрационного материала
- с помощью «Great White™ Ultra» Вы можете провести предварительное препарирование одним единственным инструментом
- идеально подходят для формирования гладко выполненного, четкого уступа
- максимально эффективны, сокращая таким образом время лечения


Чрезвычайная эффективность при препарировании
Иновационный дизайн граней
Разностороннее применение

СВАЙТ



WHITE®

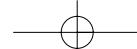

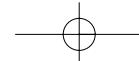

Перечень продукции и формуляр для заказа Great White™ Ultra

Инструменты «Great White™ Ultra» поставляются в следующих формах и размерах:		кол-во в упаковке
	GWU 856-016	5
	GWU 856-018	5
	GWU 856-020	5
	GWU 856-023	5
	GWU 855-025	5
	GWU 847-016	5
	GWU 847-018	5
	GWU 847-020	5
	GWU 845-016	5
	GWU 845-018	5
	GWU 845-025	5
	GWU 379-023	5
		1

Набор
«Great White™ Ultra»
для препарирования
под коронки и мосто-
видные протезы
содержит:

- 2 GWU 856-016
- 2 GWU 856-018
- 2 GWU 856-020
- 1 GWU 379-023
- 2 GWU 847-016
- 2 GWU 847-018
- 1 металлический
термоблок



Конкурентные преимущества боров серии Great White Ultra

Принимая во внимание постоянно возрастающее внимание врачей стоматологов к своей продукции, компания SS WHITE в 2003г. начинает производство боров серии Great White Ultra. Боры новой серии показывают себя в работе как первоклассные помощники стоматолога благодаря целому ряду преимуществ.

Во-первых, боры Great White Ultra изготавливаются из цельного куска карбida вольфрама, что многократно усиливает шейку бора и полностью предотвращает коррозию в месте соединения рабочей головки с хвостовиком, исключая возможность отлома головки бора во время препарирования. Во-вторых, у боров Great White Ultra существенно увеличивается длина рабочей поверхности, что позволяет эффективно препарировать опорные зубы с высокой клинической коронкой.

В-третьих, увеличивается шаг между расположением горизонтальных насечек на рабочем лезвии бора, что еще более ускоряет процесс снятия больших объемов эмали и дентина.

В-четвертых, торцевое окончание головки боров Great White Ultra увеличено в размерах и имеет больший радиус закругления, при неизменном, как и в случае боров GW, отсутствии горизонтальных насечек на закруглении головки бора. Подобная конструкция бора делает его просто идеальным инструментом для формирования окончательного уступа на культе зуба и финишной полировки уступа до глянцевой поверхности.

Теперь создание рационального полукруглого уступа при протезировании безметалловой керамикой и металлокерамикой с плечевой массой не вызывает никаких затруднений.

В-пятых, идеальная центровка боров Great White Ultra позволяет работать наконечнику без особых нагрузок и выполнять стоматологу высокоточное и равномерное снятие тканей слой за слоем.

И, наконец, разнообразие рабочих форм и размеров боров Great White Ultra предполагает использование этих боров во всех клинических ситуациях как, например, использование бора Great White Ultra 379-023 при препарировании металлических вкладок на передних зубах с язычной поверхностью, а на боковых зубах с окклюзионной поверхностью. Кроме того, боры Great White Ultra создают серию бороздок и канавок на поверхности культа зуба, которые в последствии будут способствовать идеальной фиксации ортопедической конструкции.

Использование боров серии Great White Ultra производства компании SS White во всех основных направлениях современной стоматологии показало их высокую эффективность в работе. И теперь уже трудно представить себе проведение современных, высокотехнологичных стоматологических манипуляций без использования этих боров.

