


МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

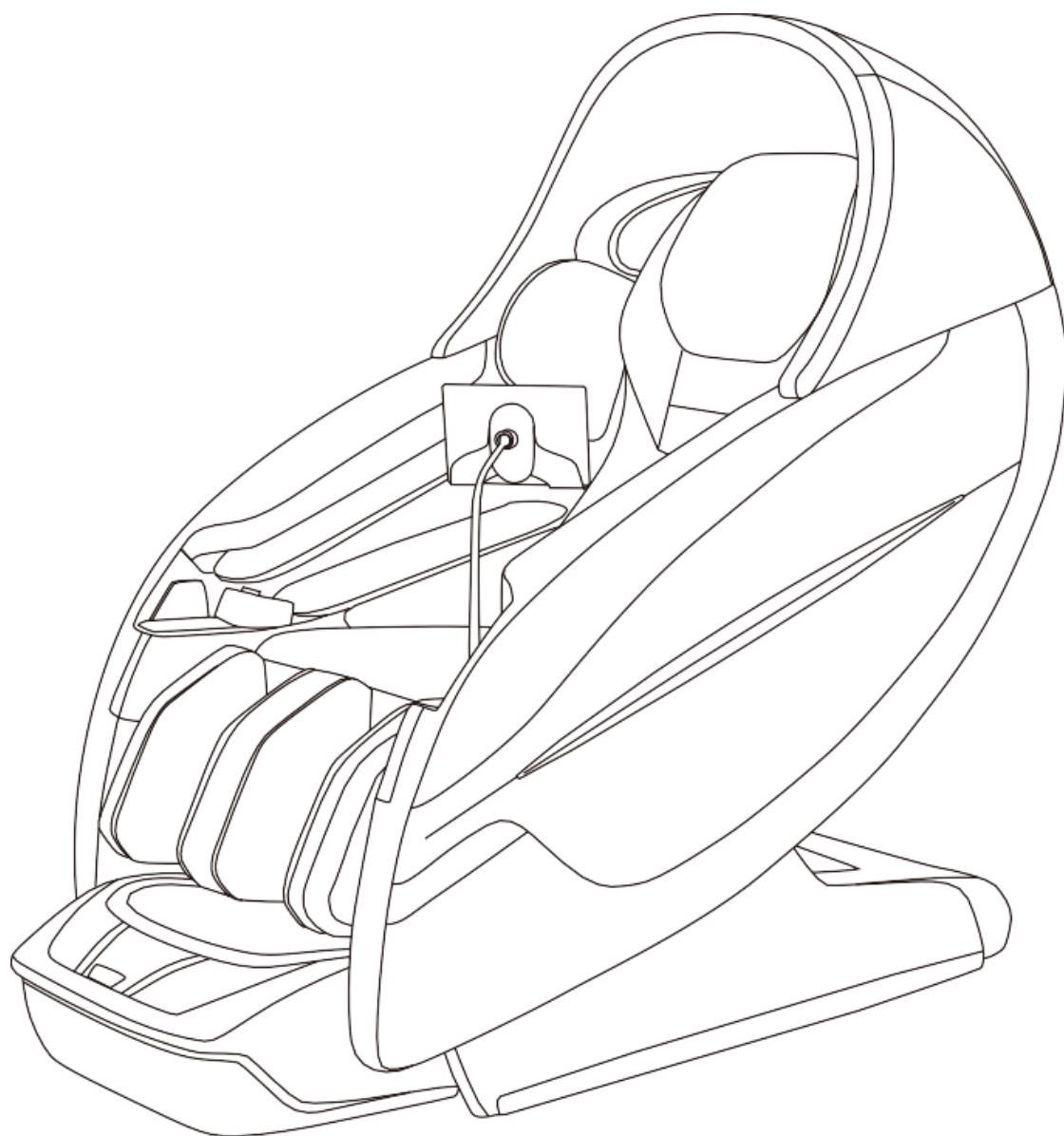

МОДЕЛЬ: KEZGA CHAIR

СОДЕРЖАНИЕ

Перед использованием массажного кресла ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности и эксплуатации, приведенными в данном руководстве, и следуйте им в будущем. В процессе эксплуатации всегда соблюдайте основные меры безопасности.

Инструкция по технике безопасности.....	3-4
Спецификация	5
Комплекующие оборудования	6-7
Установка массажного кресла	8-10
Подготовка к использованию	11
Пульт дистанционного управления	12
Руководство по эксплуатации	13-19
Устранение неполадок	20
Уход и обслуживание	21

Примечание: Наша компания оставляет за собой право пересматривать дизайн и описание данного оборудования без каких-либо дополнительных уведомлений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Правильно вставьте вилку питания в розетку. Если вилка питания подключена неверно, это может привести к поражению электрическим током.

Не заменяйте вилку питания, идущую в комплекте с оборудованием. Если вилка массажного кресла не подходит к сетевой розетке, установите подходящую розетку с помощью квалифицированного электрика.

При использовании массажного кресла всегда следует соблюдать основные меры безопасности, чтобы снизить риск поражения электрическим током.

1. Убедитесь, что вилка питания правильно и до конца вставлена в соответствующую розетку.
2. Убедитесь, что вилка питания правильно вставлена в соответствующую розетку, чтобы снизить риск возникновения короткого замыкания и возгорания.
3. Всегда вынимайте вилку питания из электрической сети сразу после завершения использования массажного кресла и перед чисткой.
4. Не используйте массажное кресло в местах с высокой влажностью воздуха.
5. Не используйте массажное кресло на открытом воздухе и избегайте мест с прямыми солнечными лучами.
6. Если во время работы отключилось питание, обязательно переведите выключатель питания в положение «0» и выньте вилку из розетки. Это предотвратит любые проблемы во время повторного включения питания.
7. Не используйте массажное кресло, если шнур питания намок или поврежден.
8. Никогда не подключайте и не вынимайте вилку питания из розетки мокрыми руками.
9. Не оставляйте кресло без присмотра, если оно используется инвалидами или детьми, или установлено в местах их нахождения.
10. Используйте массажное кресло только по прямому назначению, как описано в данном руководстве.
11. Не вставляйте, не садитесь и не прыгайте на подставке для ног, спинке и подлокотниках кресла. Это может привести к травме и неисправности кресла.
12. Не засыпайте во время сеанса массажа.
13. Всегда содержите массажное кресло в чистоте. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия и ниши массажного кресла.
14. Не передвигайте массажное кресло, потянув за шнур питания.
15. Всегда проверяйте обшивку массажного кресла перед использованием. Если вы обнаружили какие-либо разрывы обшивки кресла, немедленно прекратите использование массажного кресла и обратитесь в сервисный центр.
16. Это кресло предназначено только для домашнего использования.
17. Людям, имеющим какие-либо заболевания, необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием.
18. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажного кресла, если вы имеете одно из следующих:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Злокачественную опухоль
 - Болезни сердечно-сосудистой системы
 - Беременность, менструацию и послеродовую лихорадку
 - Остеопороз
 - Травмы спины, вызванные несчастным случаем или болезнью
 - Проходите медицинское лечение или находитесь под воздействием лекарств.
19. Если вы испытываете боль при использовании массажного кресла, прекратите массаж, проконсультируйтесь с врачом, при возникновении каких-либо травм немедленно обратитесь за медицинской помощью.
20. Никогда не массируйте опухшие или воспаленные части тела.
21. Это массажное кресло является непрофессиональным оборудованием, предназначенным для комфортного массажа. Это не замена медицинского лечения.
22. Не используйте массажное кресло более 30 минут за сеанс. Массируйте целевую область в течение 15 минут, чрезмерный массаж может привести к перегреву прибора, что сократит срок его службы.
23. Не эксплуатируйте массажное кресло, в помещениях, где используются аэрозольные (спреи) распылители или где имеется большая концентрация кислорода.
24. Массажное кресло не подходит для детей 12 лет и младше.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данный прибор может использоваться лицами (включая детей) с ограниченными умственными и физическими способностями или отсутствием опыта и знаний, если им был предоставлен надзор или проведен инструктаж человека, отвечающего за их безопасность.

В случае повреждения шнура питания, его необходимо заменить. Замена должна быть осуществлена производителем или представителем сервисной службы.

Поверхности устройства нагреваются во время работы, поэтому люди, чувствительные к теплу, должны проявлять особую осторожность при использовании массажного кресла.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Описание	Технические характеристики
Название оборудования	Массажное кресло
Модель	KEZGA CHAIR
Номинальное напряжение	220 В~
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	Вт
Размеры коробки	Основной корпус: 1460(Д)х856(Ш)х1245(В) мм
	Подставка для ног: 580(Д)х555(Ш)х640(В) мм
Вес	Основной корпус: Нетто: Брутто:
	Подставка для ног: Нетто: Брутто:

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Вид спереди

Подголовник

Bluetooth динамики

Массажная секция для плеч

Пульт управления

Воздушные подушки для рук

Блок включения питания


Беспроводная зарядка

Сиденье

Секция для ног


Боковая панель

Подставка для ног

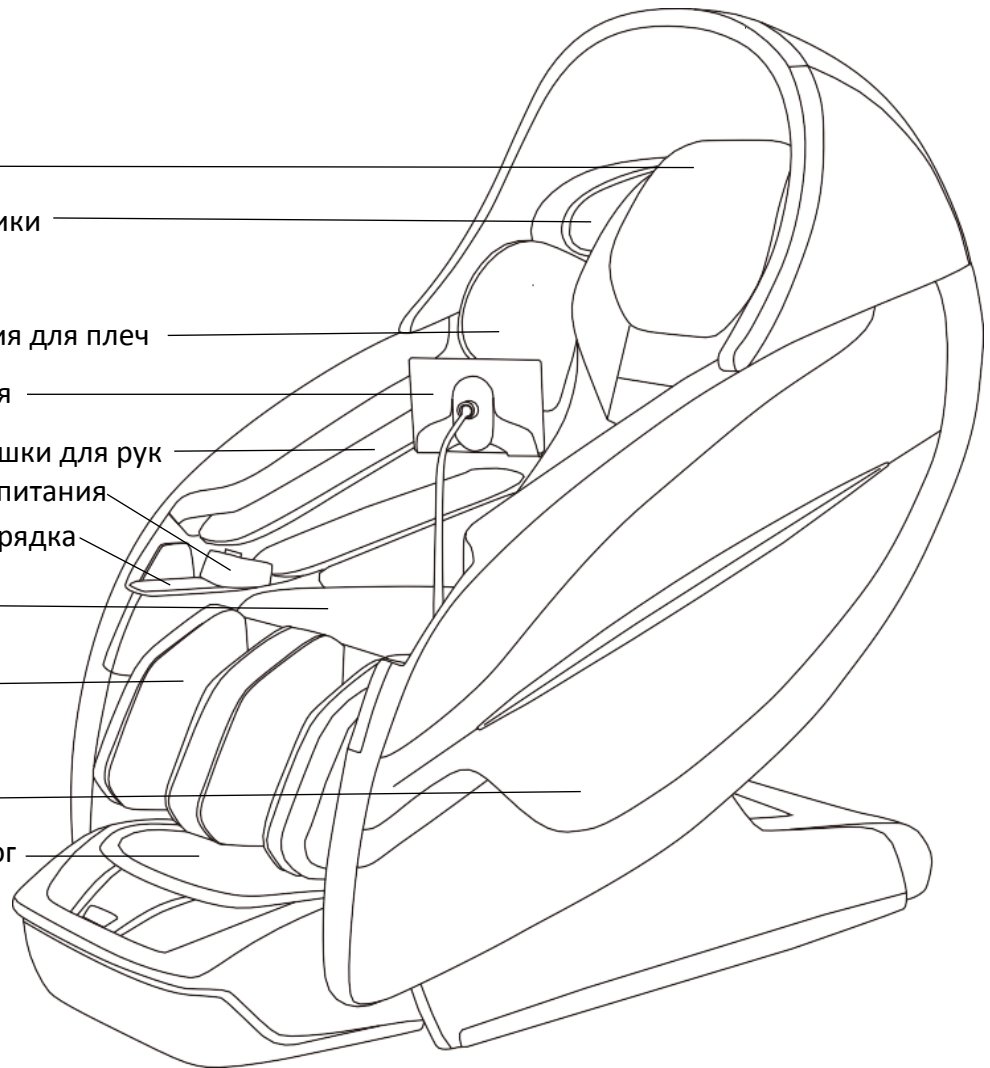


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Вид сзади

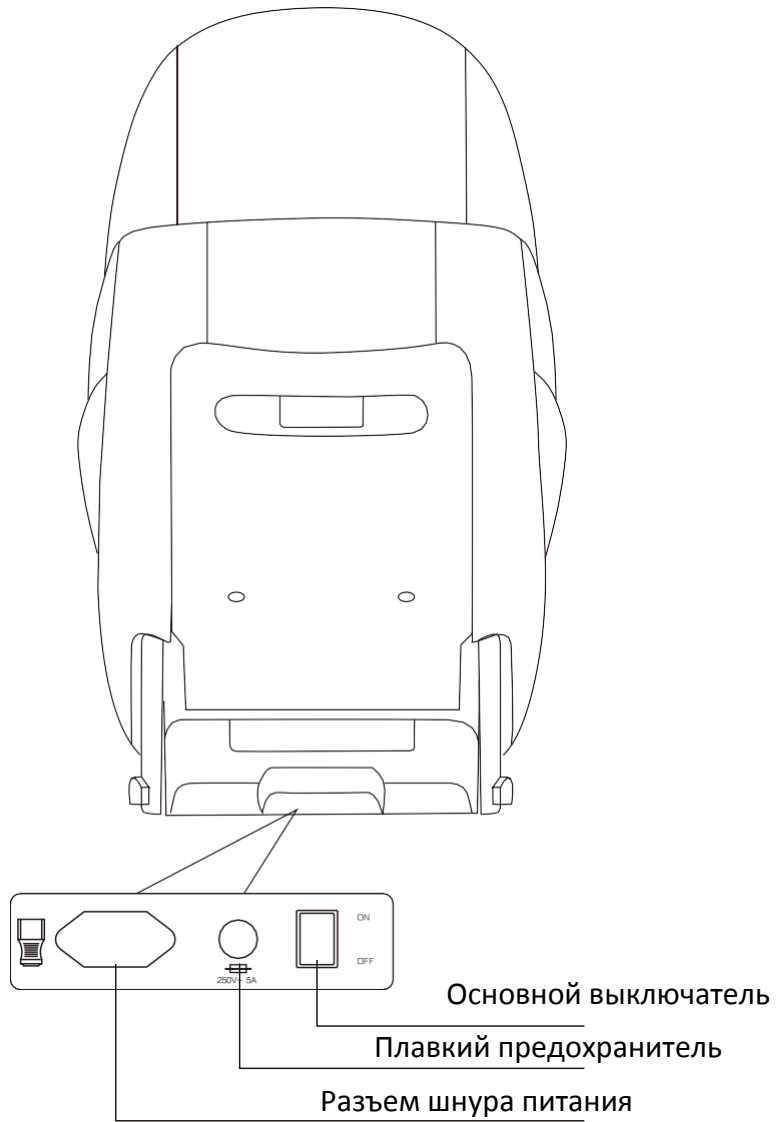


УСТАНОВКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

1 Установка подголовника

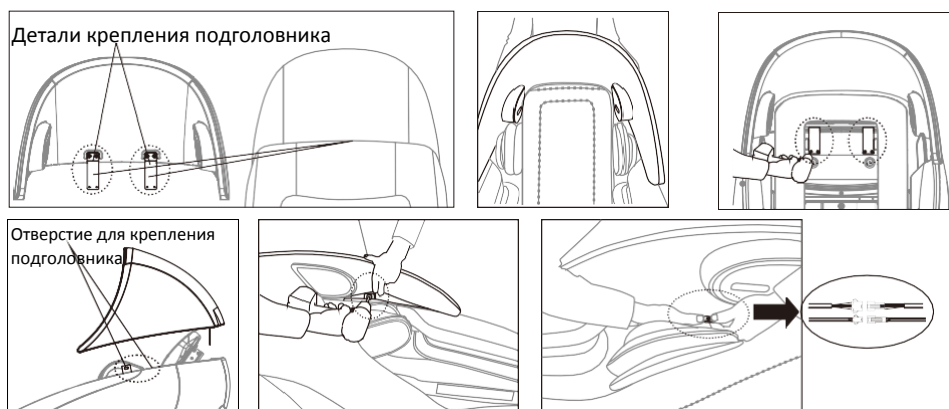

- (1) Закрепите детали крепления подголовника на его задней части 4-мя винтами.
- (2) Расстегните молнии в нижней части подголовника и износостойкой ткани спинки, наденьте подголовник поверх корпуса кресла, затем вставьте выступающую часть крепления подголовника в раму массажного кресла и совместите детали крепления подголовника с отверстиями пластиковых деталей внутри боковой панели, закрепите все 4-мя винтами. Застегните молнию на износостойкой ткани спинки.
- (3) Детали крепления подголовника с обеих сторон корпуса кресла вставляются в кожаную втулку подголовника, и закрепляются одним винтом с каждой стороны.
- (4) Найдите и прикрепите клеммы проводов слева и справа подголовника к клеммам проводов слева и справа корпуса кресла, а затем скройте провода, которые хорошо соединяются в эластичный тканевый рукав.
- (5) Застегните обе молнии в нижней части подголовника.

2 Установка подушки сиденья

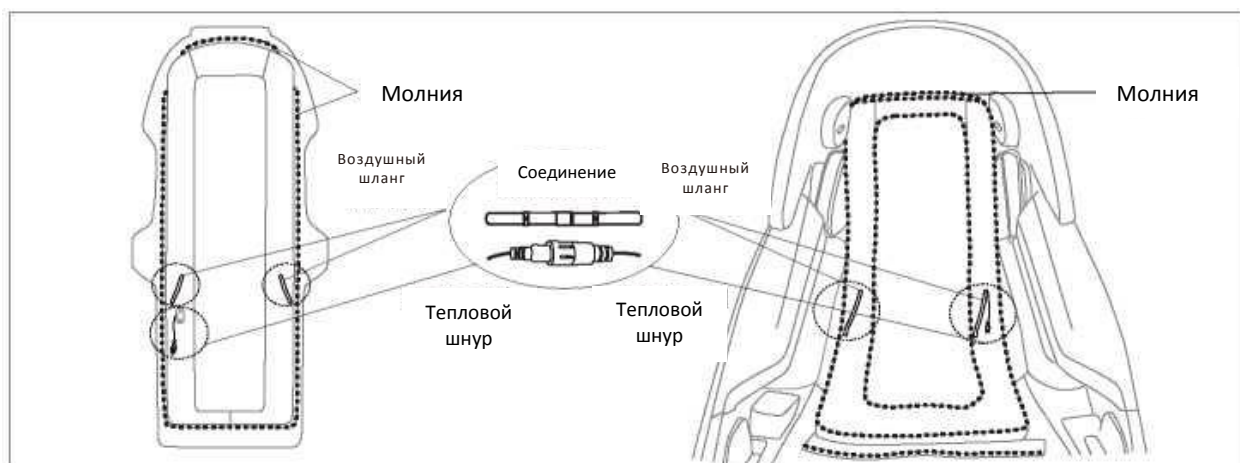

УСТАНОВКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА


- (1) Сначала подсоедините тепловой шнур и воздушные шланги в спинке и подушке сиденья к тепловому шнуру и воздушным шлангам в корпусе кресла.
- (2) Затем застегните молнии на подушке сиденья и массажном кресле.

3 Установка секции для ног



- (1) Сначала соедините шланг секции ноги с шиной на массажном кресле.
- (2) Поднимите секцию ноги и оденьте ее шайбу в правом верхнем углу на металлический штифт массажного кресла, затем закрепите это все фиксатором.
- (3) При установке левой стороны сначала переместите всю секцию ноги вправо, выровняйте шайбу в верхнем левом углу и штифт массажного кресла, переместите секцию ноги влево, затем закрепите все фиксатором.
- (4) Подтяните кобуру на ноге к молнии массажного кресла.
- (5) Застегните кожаный чехол.


4 Установка пульта дистанционного управления

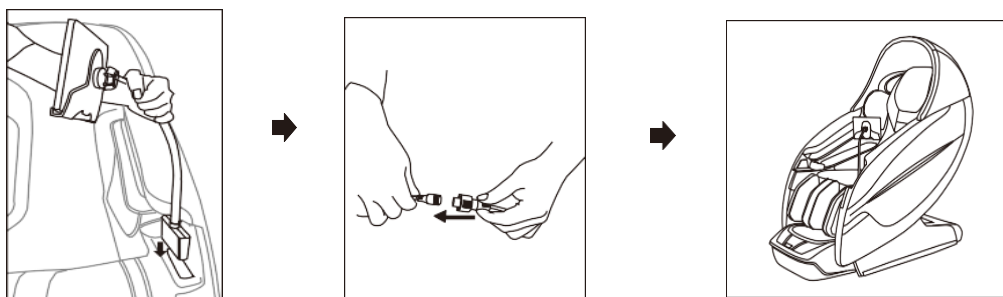

- (1) Вставьте кронштейн пульта управления в левый разъем массажного кресла.
- (2) Затем подключите соединение между пультом дистанционного управления и массажным креслом.

УСТАНОВКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

5 Перемещение массажного кресла

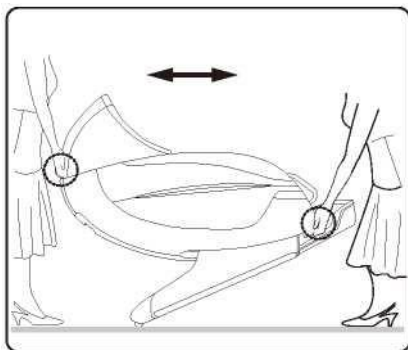


Передвигайте массажное кресло вдвоем. Один из вас должен держать за боковую панель и поднимать, как показано на схеме. Другой должен давить на спинку кресла так, чтобы колесики, расположенные на спинке стула, касались пола.

Передвигайте массажное кресло с помощью колесиков. После перемещения в нужное место медленно и осторожно опустите массажное кресло.

Примечание: Не передвигайте массажное кресло с сидящим в нем человеком.

Чтобы не повредить пол, передвигайте массажное кресло, подстелив под него какое-либо ковровое покрытие.

6 Установите массажное кресло в просторном месте

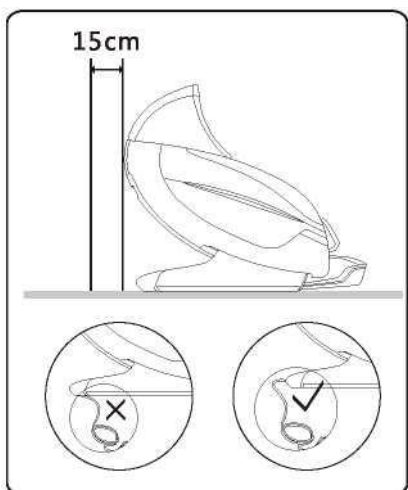

- Убедитесь, что имеется достаточно места для раскладывания кресла: 15 см за спинкой кресла и 40 см перед подставкой для ног.


* Чтобы избежать повреждения пола и уменьшить шум, установите массажное кресло на ковровом покрытии.

* Убедитесь, что перед и позади массажного кресла нет препятствий.

* Не устанавливайте кресло на мокром или неровном полу.


* Чтобы избежать помех в сигнале, разместите кресло вдали (не менее 4 футов) от аудио-, теле- и радио устройств.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

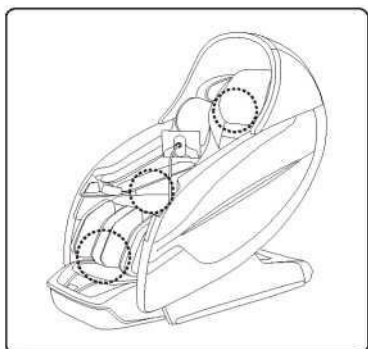


1. Убедитесь, что изделие находится в исправном состоянии.

- Проверьте подголовник и подушку спинки.
- Проверьте вилку питания.
- Чтобы избежать повреждений, убедитесь, что подставка для ног находится в исходном вертикальном положении.

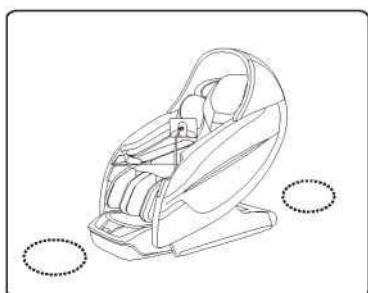


2. Проверьте пространство вокруг кресла

- Убедитесь, что рядом с креслом нет человека, домашних животных или других объектов.

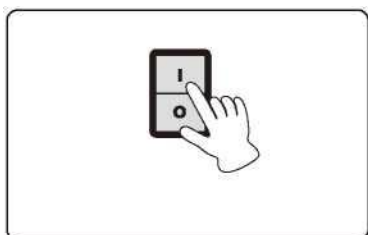

3. Подключите шнур питания к массажному креслу

- Подсоедините кабель питания.
- Включите выключатель питания, расположенный с правой стороны массажного кресла.

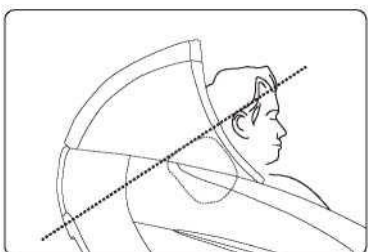

4. Отрегулируйте положение подголовника.

- Отрегулируйте подголовник так, чтобы вам было удобно.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Клавиши быстрого доступа



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1. Интерфейс и описание пульта дистанционного управления

1. Откройте пульт дистанционного управления, и на экране появится главное меню. Выберите нужную вам программу.



- | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Утро | 2. Обновление | 3. Управление вручную |
| 4. Вернуться назад | 5. Воздушно-компрессионная подушка | 6. Выключение |
| 7. Пауза | 8. Настройки | 9. Другие автоматические режимы |


2. Установка

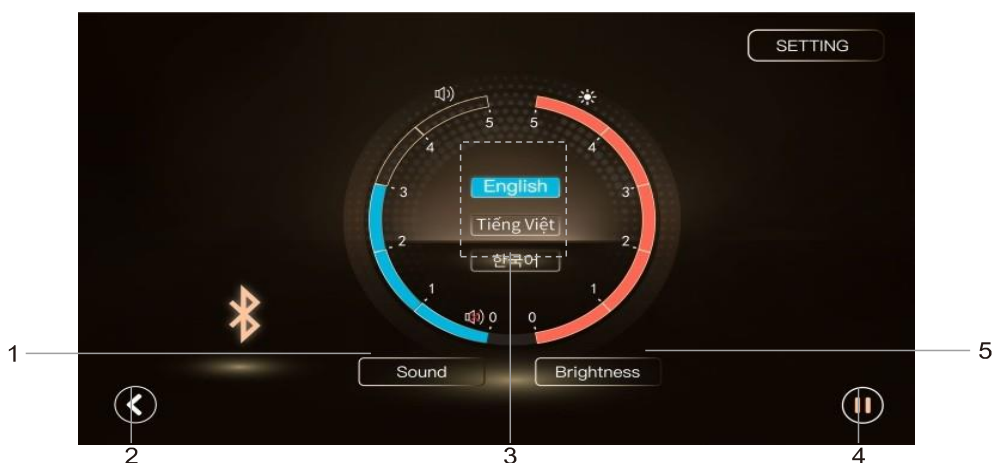

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. Область регулировки звука | 2. Вернуться назад | 3. Выбор языка |
| 4. Пауза | 5. Область настройки яркости экрана | |

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. Распознавание

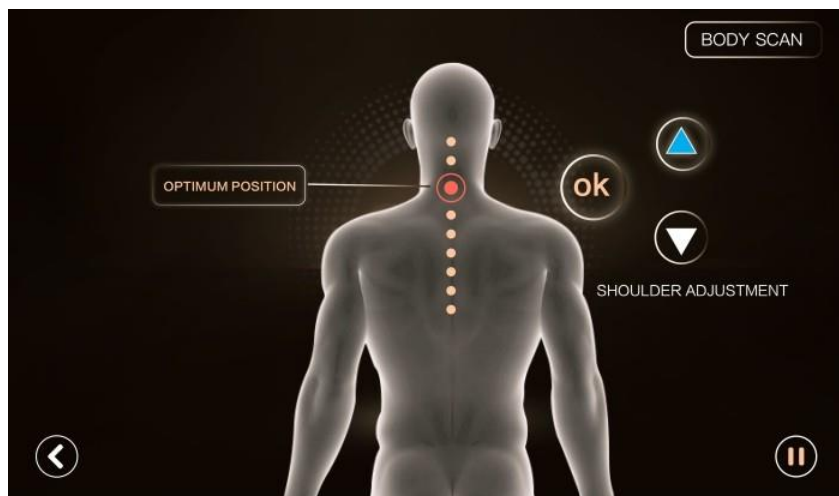

1. Новейшая техника сканирования тела
2. В течение 8 секунд после сканирования пользователь может выполнить корректировку положения плеч или нажать ОК для подтверждения.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. Сон



- 1. Отдых и сон
- 2. Утро
- 3. Вернуться назад
- 4. Пауза
- 5. Легкое покачивание
- 6. Снятие усталости

5. Автоматические режимы

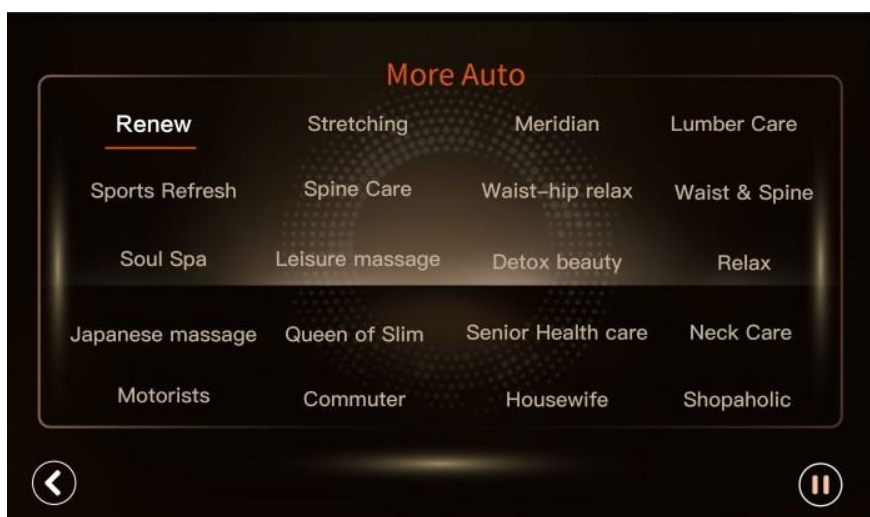

В данном окне имеется 20 видов уникальных автоматических режимов массажа.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Название автоматического режима массажа
2. Интенсивность 4D
3. Интенсивность воздушно-компрессионного массажа
4. Положение механизма/воздушных подушек/нагрева/роликов
5. Выбор области нагрева
6. Выбор области роликового массажа
7. Другие автоматические режимы массажа
8. Интенсивность механизма
9. Установка продолжительности сеанса массажа

6. Настройка массажа вручную



1. Управление положением поясницы
2. Управление положением шеи и плеч
3. Регулировка ширины массажа (она не работает после начала разминания)
4. Разминание I / Разминание II
5. Постукивание I / Постукивание II
6. Похлопывание I / Похлопывание II
7. Массаж Туйна
8. Выбор области массажа
9. Управление положением бедер

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. Массаж воздушно-компрессионными подушками



1. Область регулировки интенсивности воздушного массажа
2. Указатель положения воздушного массажа
3. Область выбора положения воздушного массажа
4. Вернуться назад
5. Область нагрева
6. Область роликового массажа
7. Пауза

8. Регулировка положения



1. Поднятие/ опускание спинки кресла
2. Уменьшение/ увеличение длины подставки для ног
3. Поднятие/ опускание подставки для ног
4. Положение невесомости: три варианта

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9. Управление голосом



Скажите " Voice ON " и произнесите ключевую фразу, как показано на рисунке, и массажное кресло включит соответствующую функцию.

10. Внимание



Когда массажное кресло отобразит подсказку о защите от защемления (выше), массажное кресло автоматически остановится. Пожалуйста, проверьте, нет ли посторонних предметов под спинкой массажного кресла, между икрой и стопой. Нажмите кнопку, массажное кресло выключится под самым безопасным углом; нажмите кнопку еще раз, массажное кресло пройдет повторное тестирование и продолжит работу.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. Воспроизведение музыки через Bluetooth динамики:

А: Сопряжение: Откройте функцию Bluetooth в мобильном телефоне или iPad и выполните поиск устройств поблизости, выберите музыкальное оборудование массажного кресла с функцией Bluetooth и выполните сопряжение с ним.

В: Воспроизведение музыки: После сопряжения, список воспроизведения отобразится на экране мобильного телефона или в приложении.

Внимание:

Если вы не используете Bluetooth, то отключите его, чтобы не создавать помех в работе других устройств.


12. После использования



1) Нажмите кнопку питания, чтобы выключить массажное кресло.

*Убедитесь, что вокруг массажного кресла нет никаких препятствий.

2) Встаньте, когда массажное кресло вернется в исходное положение.

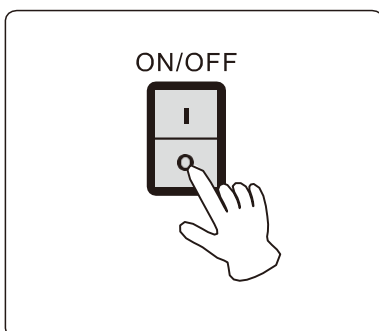

3) Выключите основной выключатель питания.

4) Выньте вилку из розетки.

* Не тяните за шнур питания, чтобы вынуть вилку.


* Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если звуки или движения не являются характерными для кресла, выключите его и выньте вилку из электрической розетки. Свяжитесь с сервисным центром для получения дополнительной помощи.

Проблема	Решение
Массажное кресло подключено к источнику питания, но не работает.	1. Проверьте, правильно ли вставлена вилка питания или исправна ли розетка. 2. Проверьте, находится ли основной выключатель питания в положении "I".
Пульт дистанционного управления отвечает, но массажное кресло не работает.	Возможно, массажное кресло автоматически отключилось из-за срабатывания защиты от перегрева. Пожалуйста, выключите питание и дайте креслу остыть в течение 30-50 минут.
Пульт дистанционного управления и массажное кресло не отвечают.	Массажное кресло автоматически переходит в режим "полной остановки" или в режим "простоя" по завершении программы массажа. Пожалуйста, нажмите кнопку питания еще раз, чтобы включить кресло.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

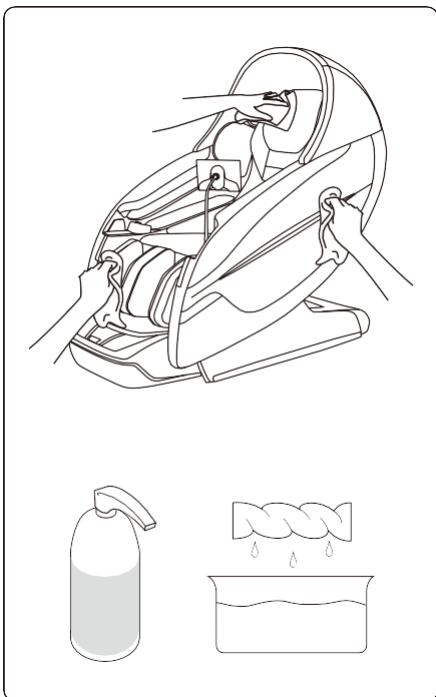


- Выключите и выньте вилку питания перед чисткой массажного кресла, не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками.

- Используйте сухую ткань, чтобы вытереть пот и другие загрязнения с кресла.

- Пожалуйста, используйте нейтральные моющие средства, чтобы вытереть и слегка почистить кресло.

- Проветривайте кресло.

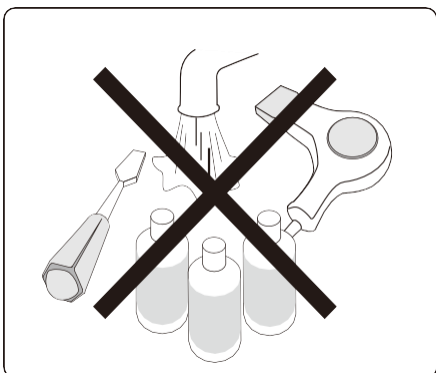

- Не используйте воду для чистки кресла.

- Не используйте спирт, бензол содержащие и другие моющие средства.