



Smith+Nephew

Средства перевязочные
Повязка абсорбирующая

JELONET[◇]

для легких ожогов

СТЕРИЛЬНО



Для одноразового использования. Стерилизовано гамма-излучением. Не используйте содержимое, если упаковка открыта или повреждена. Хранить на плоской поверхности в сухом месте (<25 °С). Беречь от солнечных лучей.

Описание

Повязки для легких ожогов JELONET® успокаивают и защищают травмированное место. Они так же помогают предотвратить прилипание абсорбирующей прокладки MELOLIN® к ране. Повязки подходят для различных легких ран, в особенности ожогов. JELONET не содержит медикаментов.

Показания

Повязки JELONET разработаны для использования при небольших ожогах, ожогов кипятком и язвах голеней.

Меры предосторожности при использовании



В случае язв на ногах используйте только по рекомендации врача. Немедленно обратитесь к врачу в случае любых серьезных ран или ожогов, а также, если возникает покраснение или дискомфорт. JELONET является продуктом одноразового использования. В случае использования более чем для одного пациента может возникнуть перекрестное заражение или инфекция. При открытии упаковки нарушается стерильная защита, соответственно, неиспользованные повязки не должны храниться для будущего использования.

Инструкция по применению



1. Вымойте руки до и после обработки раны.
2. Осторожно очистите и высушите рану и окружающую кожу.




3. Извлеките повязку из упаковки.
4. Снимите и утилизируйте обе бумажные подложки с повязки, держа повязку только за края. *Примечание.* На бумажных подложках остается излишний гель.

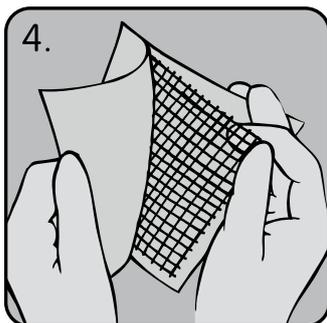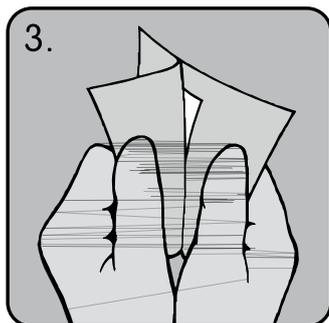

5. Осторожно наложите повязку на рану одним слоем.
6. При необходимости накройте повязку абсорбирующей прокладкой.

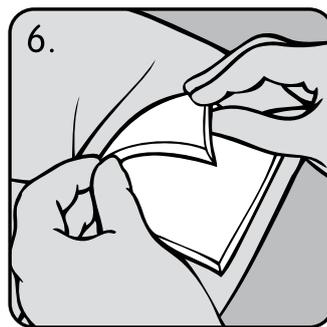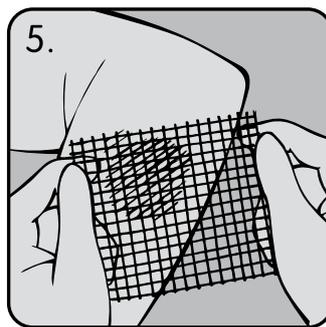

7. Зафиксируйте повязку(и) бинтом или лентой.

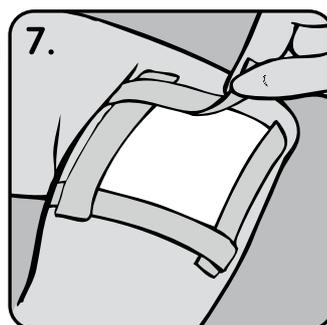

Уход за повязкой

Повязки для ожогов JELONET можно оставлять на ране, пока они не начнут высыхать. Если необходимо сменить абсорбирующую прокладку, повязку JELONET можно оставить на месте, если она еще влажная. Частота смены повязки зависит от клинических обстоятельств и может быть от одного раза в день до двух раз в неделю, но повязка должна удаляться, если она начинает высыхать. Если повязка прилипнет, аккуратно смочите ее стерильным физиологическим раствором.

Доступность продукта

Доступны повязки для легких ожогов JELONET следующих размеров:

- 5 см x 5 см
- 10 см x 10 см
- 10 см x 40 см
- 15 см x 2 м
- 10 см x 7 м

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101
Hessle Road, Hull HU3 2BN, England
° Торговые знаки Smith & Nephew

©Smith & Nephew
Дата выдачи 02/2015
www.smith-nephew.com



УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ:

ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва,
2-й Сыромятнический пер., д.1, 9 этаж, пом. 1, ком.1
Тел: +7 (495) 755-55-03